

Ngày 07 tháng 9 năm 2017

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên cơ sở: Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ 252 - 254 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế :

Stt	Bảng chỉ màu (hấp ướt/hấp khô)	
1	Mục đích/chỉ định sử dụng	- Sản phẩm Bảng keo chỉ thị màu - là một loại Chỉ thị hóa học, dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn. Sự thay đổi màu sắc của băng keo này sẽ giúp báo hiệu gói dụng cụ đã tiếp xúc qua quá trình tiệt khuẩn hay chưa
2	Hướng dẫn sử dụng	- Dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn. Khi trên băng chỉ thị có những vạch màu nâu tức là đã có sự thay đổi về màu sắc, báo hiệu gói dụng cụ đã tiếp xúc qua quá trình tiệt khuẩn. - Tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C thì sẽ xuất hiện vạch màu nâu sau 15 phút. - Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C thì sẽ xuất hiện vạch màu nâu sau 3 phút.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở   
GAM ĐỐC



**TRẦN NGUYỄN VĂN THẮNG**