



## CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC

Địa chỉ: 62/33 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Email: [khabaophuc@gmail.com](mailto:khabaophuc@gmail.com) Hotline: 0919337883

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

#### Khi sử dụng các dụng cụ của chúng tôi xin lưu ý:

1. Phải sử dụng đúng từng loại dụng cụ cho từng mục đích sử dụng.
2. Không sử dụng các chất, hóa chất có tính bám dính lên trên dụng cụ vì sẽ làm hỏng bề mặt sản phẩm và có thể làm phai màu, gỉ hoặc mòn ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm.
3. Người sử dụng dụng cụ phải là người có được đào tạo về kiến thức chuyên môn cách sử dụng dụng cụ phẫu thuật.
4. Dụng cụ nên được sắp xếp riêng lẻ trong hộp car-ton hoặc trong khay bảo vệ có phân vùng khi vận chuyển. Bảo vệ đỉnh đầu, lưới cạnh... với ống, nắp bảo vệ, gạc hoặc vải.
5. Không sử dụng dầu để bôi trơn dụng cụ, chỉ sử dụng các chất bôi trơn có thể hoà tan trong nước không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người được bộ y tế cho phép sử dụng.
6. Không ngâm dụng cụ quá lâu hơn mức cần thiết trong dung dịch tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng, nên rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ tất cả hóa chất để ngăn dụng cụ bị phai màu hoặc bị ăn mòn.
7. Trước khi sử dụng, trước khi tái sử dụng và trước khi gửi đến nhà sản xuất để sửa chữa, tất cả các dụng cụ phải được bảo dưỡng và tiệt trùng.
8. Không sử dụng các chất tẩy rửa, bàn chải có lông cứng, bàn chải sắt khi làm sạch dụng cụ. Chỉ sử dụng vải hoặc bàn chải lông mềm để vệ sinh dụng cụ.
9. Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng để phòng dụng cụ bị hỏng.
10. Đặc biệt chú ý đến các dụng cụ vi phẫu vì các đầu dụng cụ có thể dễ dàng bị hỏng khi tiếp xúc với các dụng cụ khác.
11. Đảm bảo tất cả các dụng cụ được bảo quản trong khu vực sạch sẽ, khô ráo, không bị ẩm ướt. Đảm bảo rằng không có hóa chất gần hoặc trong khu vực nhà kho.
12. Dụng cụ nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 132<sup>0</sup>C trong 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật. Nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 137<sup>0</sup>C

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



*Nguyễn Thị Tuyết Diễm*