



GIÁM ĐỐC

DIRUI®

Chào Xuân Hưởng dẫn sử dụng

Tên trang thiết bị: IVD nước rửa trong xét nghiệm huyết học

Chủng loại: Probe Cleanser

Đóng gói: 50mL, 4x50mL

Mục đích sử dụng: Sử dụng để làm sạch các bộ phận phát hiện của máy, van xoay, đường ống hút mẫu máu, cuvette hemoglobin và ngăn hình thành protein.

Nguyên lý: Như một loại nước rửa kiềm mạnh có tác dụng để loại bỏ dung dịch tế bào và protein còn sót lại trên máy xét nghiệm huyết học tự động.

Thành phần chính: Sodium Hypochlorite

Điều kiện bảo quản và tuổi thọ sản phẩm: Khi được bảo quản ở 2-30°C, tránh ánh sáng, sản phẩm có tuổi thọ cho đến ngày hết hạn ghi tên tem nhãn.

Dùng cho thiết bị: Máy xét nghiệm huyết học dòng BCC.

Hướng dẫn sử dụng: Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm huyết học.

Chỉ số hoạt động của sản phẩm: pH 12.30 ± 0.30 ở nhiệt độ (25±1) °C











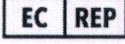
Chú ý:

- Sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ 15°C- 30°C
- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu tiếp xúc với da, rửa phần tiếp xúc ngay. Nếu tiếp xúc với mắt, rửa mắt với nhiều nước ngay và tư vấn bác sỹ. Nếu nuốt sản phẩm, cần ngay lập tức đến cơ sở y tế để được xử lý.
- Sản phẩm có chứa sodium hypochlorite. Nhãn cảnh báo nguy hiểm được dán trên sản phẩm theo quy định của Ủy ban Châu Âu.
 - R31: Giải phóng khí gas độc khi tiếp xúc với axit
 - R36/38: Gây kích ứng da và mắt
 - S50: Không trộn với axit
 - S24/25: Tránh tiếp xúc với da và mắt
- Mẫu, nước thải và các vật thải bỏ đều có nguy cơ lây nhiễm sinh học nên cần tuân thủ nguyên tắc an toàn của phòng xét nghiệm. Xử lý rác thải theo nguyên tắc của địa phương.

Tài liệu tham khảo:

Li Jingfen. Effect of additives on the stability of sodium hypochlorite and peracetic acid (J). Heilongjiang Medical Journal, 2001 (2):8

Ký hiệu:

 Đọc kỹ HSDS trước khi dùng	 Bảo quản ở	 Bảo quản nơi tối	 Nhà sản xuất
 Lot sản phẩm	 Hạn sử dụng	 Số catalogue	 Mức độ nguy hiểm
 Hóa chất in-vitro	 Chi thị 98/79/EC (IVDD)	 Đại diện ủy quyền	

Ngày phê duyệt và sửa đổi: 02/2019



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone, Changchun, Jilin 130012, P.R. China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

Email: dirui@dirui.com.cn

http://www.dirui.com.cn



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands