

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ỐNG NGHIỆM MÁU CHÂN KHÔNG

I. Mô tả hàng hóa

1. Xuất xứ:

- Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd/ Trung Quốc

2. Chủng loại sản phẩm:

1. Ống nghiệm máu chân không EDTA K3, 2ml. 13 x 75mm (Glass)
 2. Ống nghiệm máu chân không EDTA K3, 2ml. 13 x 75mm (Plastic)
 3. Ống nghiệm máu chân không Lithium Heparin, 3ml. 13 x 75mm (Glass)
 4. Ống nghiệm máu chân không Lithium Heparin, 3ml. 13 x 75mm (Plastic)
 5. Ống nghiệm máu chân không Sodium Citrate 3,8%, 2ml. 13 x 75mm (Glass)
 6. Ống nghiệm máu chân không Sodium Citrate 3,8%, 2ml. 13 x 75mm (Plastic)
 7. Ống nghiệm máu chân không Clot Activator, 3ml. 13 x 75mm (Glass)
 8. Ống nghiệm máu chân không Clot Activator, 3ml. 13 x 75mm (Plastic)
- Ống nghiệm nhựa PET
 - Chất liệu nắp: Brombutyt
 - Chất liệu bảo vệ nắp: Polypropylene
 - Phương pháp tiệt trùng: Tia beta 15kGy
 - Hình dạng ống: Hình trụ
 - Đảm bảo vô khuẩn.
 - Các loại ống nghiệm máu chân không có chứa chất kháng đông đều có nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu là tiêu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 – 8 giờ.

II. Hướng dẫn sử dụng

- Máu được lấy trong bơm tiêm, sau đó tháo rời kim ra.
- Bơm máu vào thành trong của ống đến thể tích quy định.
- Đậy nắp lại và đảo ngược vài lần thật kỹ cho máu trộn đều với chất kháng đông.
- Các ống nghiệm chưa sử dụng đến nên để ở trên giá.
- Ống chỉ sử dụng 1 lần
- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Không sử dụng ống khi ống bị hỏng, vỡ, hết hạn sử dụng.

Đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi đầy đủ họ tên, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Trần Anh Quân