

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ống nối dây máy thở cao tần

Extendable Catheter Mount (Flexible)

Loại: 15 cm

Mã sản phẩm: 004-003-1001, 004-003-1002, 004-003-1003, 004-003-1005, 004-003-1006, 004-003-1007, 004-003-2001, 004-003-2002, 004-003-2003, 004-003-2004, 004-003-2005, 004-003-2006, 004-004-1001, 004-004-2001, 004-004-2002, 004-005-1001, 004-005-1002, 004-005-1003, 004-005-1004, 004-005-1005, 004-005-1006, 004-005-1007, 004-005-2001, 004-005-2002, 004-005-2003, 004-005-2004, 004-005-2005, 004-005-2006, 004-006-1001, 004-006-2001, 004-006-2002, 004-007-1001, 004-007-1002, 004-007-1003, 004-007-1005, 004-007-1006, 004-007-1007, 004-007-2001, 004-007-2002, 004-007-2003, 004-007-2004, 004-007-2005, 004-007-2006, 004-008-1001, 004-008-2001

Mục đích/ chỉ định sử dụng:

Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra

Hướng dẫn sử dụng:

- Ống nối dây máy thở cao tần được cấu tạo từ các thành phần: đoạn ống thở, đầu nối ống (Kết nối phía máy), công hút dịch có nắp đậy và co nối xoay chữ T linh hoạt (thân và đầu nối của co có thể xoay)
- Sản phẩm được đóng gói tiệt trùng và sử dụng một lần.

Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý:

- Sản phẩm Ống nối dây máy thở cao tần khi được sử dụng thì cần được phân loại là rác thải y tế và cho ngay vào thùng rác thải y tế. Không được vứt, bỏ rác thải này ở nơi công cộng
- Trước khi sử dụng thì cần kiểm tra bao bì và tính nguyên vẹn của sản phẩm, không sử dụng các sản phẩm đã bị rách, thủng, hư hỏng



- Sản phẩm Ống nối dây máy thở cao tần khi chưa sử dụng cần bảo quản trong thùng, hộp hoặc túi kín, để nơi khô mát, tránh gần nguồn nhiệt, tránh tiếp xúc với các hóa chất, dung môi

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

