

Hướng dẫn sử dụng

Dây truyền máu

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:

Dây truyền máu: sử dụng cho việc truyền máu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Đóng Con lăn Kẹp.
2. Tháo nắp bảo vệ khỏi thiết bị xỏ lỗ và lắp vào đầu ra của hộp đựng máu.
3. Treo thùng chứa, lấp đầy một nửa phần dưới của buồng nhỏ giọt bằng cách ép và thả. Không điền hoàn toàn.
4. Tháo nắp bảo vệ khỏi kim bằng cách giữ kim thẳng đứng, mở bộ điều chỉnh dòng chảy và để máu chuyển hoàn toàn không khí ra khỏi ống và kim. Đóng bộ điều chỉnh lưu lượng.
5. Thực hiện kiểm tra tĩnh mạch và điều chỉnh dòng chảy bằng cách mở kẹp con lăn.
6. Được thiết kế để cung cấp 20 giọt nước cất tương đương với $1 \pm 0,1\text{ml}$ ($1 \pm 0,1\text{g}$)

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:

- Chỉ sử dụng một lần
- Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Kiểm tra hạn sử dụng trước khi sử dụng.
- Nên sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng.
- Kiểm tra trực quan và kiểm tra kỹ sản phẩm, bao bì trước khi sử dụng. Vận chuyển và xử lý không đúng cách có thể gây ra hư hỏng cấu trúc và / hoặc chức năng cho thiết bị hoặc bao bì.
- Sản phẩm được đảm bảo không độc hại, vô trùng và không gây dị ứng nếu bao bì chưa được mở hoặc bị hư hỏng.
- Bỏ đi sau khi sử dụng.
- Sau khi sử dụng, sản phẩm này có thể tiềm ẩn nguy cơ sinh học. Xử lý và vứt bỏ theo thông lệ y tế được chấp nhận và các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và quốc gia.
- Đảm bảo vứt bỏ sản phẩm và đóng gói đúng cách sau khi sử dụng.
- Sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở từng vỉ đóng gói.
- Sản phẩm không được gia công lại.
- Sản phẩm nên được sử dụng bởi bác sĩ / người hành nghề đã đăng ký hoặc y tế.
- Bảo quản trong điều kiện mát và khô. Bảo vệ khỏi nhiệt độ quá cao hoặc ánh nắng trực tiếp.

SẢN PHẨM CỦA: La-Med Healthcare Pvt, Ltd.

Địa chỉ: Plot No. 136, Sector-24, Faridabad, Haryana – 121005, Ấn Độ.

CHỦ SỞ HỮU SỞ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - NHÀ NHẬP KHẨU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA.

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



BS. Bùi Hữu Hiền