

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CLIP CÀM MÁU DÙNG MỘT LẦN

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Quyết

Địa chỉ: Số 202 ngõ 121 đường Giáp Bát, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 18 tháng 04 năm 2022

STT	Đề mục	Nội dung
1	Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế	<ol style="list-style-type: none">1. Xé túi đựng kẹp, lấy clip ra.2. Xé túi đóng gói của cán clip, lấy cán ra.3. Nhét ống lò xo của cán vào lỗ của hộp clip đến cuối, và dùng lực ấn vào đầu rộng của hộp clip để tránh ống lò xo trượt xuống;4. Đẩy vòng trượt của cán clip về phía trước bằng ngón trỏ và ngón giữa cho đến khi nghe thấy âm thanh “ka-da”, sau đó kéo vòng trượt lại, rút clip ra khỏi hộp clip cho đến khi hoàn toàn đi vào ống lò xo ;5. Kiểm tra kỹ clip đã vào ống lò xo chưa.6. Đưa ống lò xo vào ống nội soi, cho đến khi đầu trên của ống lò xo xuất hiện trong trường quan sát.7. Đẩy nhẹ vòng trượt, đảm bảo clip kéo căng ra khỏi ống lò xo, cho đến khi xuất hiện hai cánh màu trắng trên clip.8. Kéo từ từ vòng trượt phía người dùng để mở clip ở trạng thái mở tối đa9. Giữ vòng ngón tay cái trên tay cầm, xoay tay cầm để điều chỉnh hướng trực giúp gấp mô dễ dàng10. Đặt kẹp vào vùng tổn thương, sau đó kéo lại vòng trượt bằng lực thích hợp, đóng kẹp để kẹp vị trí mô đích.11. Giữ kéo vòng trượt trở lại cho đến khi chạm đến cuối tay cầm. Đảm bảo kẹp hoàn toàn rời khỏi ống lò xo.12. Rút các cán clip ra khỏi kênh làm việc của nội soi.13. Vứt bỏ theo các quy tắc và luật xử lý chất thải y tế của địa phương

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi rõ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC