

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM VINH GIA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. THÀNH PHẦN

Tên sản phẩm: DUNG DỊCH XỊT MŨI

Model/mã sản phẩm: THẢO DƯỢC XỊT MŨI VINH GIA B

Thành phần: Dịch chiết ngũ sắc, ké đầu ngựa, tân di hoa, natri chloride, polysorbate, natri benzoat, PEG, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu long não, nước tinh khiết vừa đủ.



2. CÔNG DỤNG

- Làm giảm tình trạng sổ mũi, sổ mũi kéo dài, nghẹt mũi, hắt hơi, ngứa mũi, trong viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, cảm cúm. Làm thông thoáng đường mũi xoang, đào thải dịch nhày trong xoang mũi và xoang trán.

- Hỗ trợ làm giảm triệu chứng của viêm xoang, giúp làm giảm đau đầu, nhức hốc mắt do viêm xoang

- Phòng tránh viêm đường hô hấp do virus, vi khuẩn.

-Giúp giảm sự phụ thuộc vào thuốc co mạch và corticoid.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng cho trẻ em từ 1 tuổi và người lớn. Trước khi xịt, nên làm sạch mũi xoang bằng dung dịch vệ sinh mũi “ Xịt rửa MŨI XOANG VINH GIA” để đạt hiệu quả cao hơn.

Bước 1: Tháo nắp bảo vệ đầu nhấn và vòi xịt.

Bước 2: Lắc đều trước khi xịt.

Bước 3: Cầm lọ theo phương thẳng đứng, ấn vào 2 bên cánh của đầu xịt 1 - 2 lần trong không khí để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.

Bước 4: Hướng đầu xịt phun sương vào vùng mũi xoang. Ấn dứt khoát để dung dịch đi sâu vào vùng mũi xoang. Mỗi bên mũi xịt 2 – 3 nhíp, xịt xong bịt bên mũi còn lại và hít sâu để dung dịch thấm sâu vào vùng niêm mạc mũi xoang. Lặp lại với bên mũi còn lại.

- Ngày xịt 3 - 6 lần tùy vào mức độ nặng nhẹ.

- Sản phẩm an toàn, có thể dùng lâu dài hàng ngày, dùng được cho trẻ em từ 1 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bị mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm

5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. BẢO QUẢN

- Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.


7. HẠN SỬ DỤNG

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

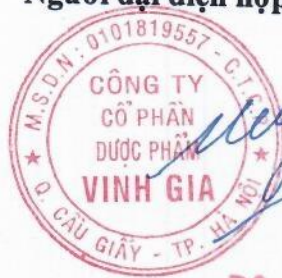

GIÁM ĐỐC
DS. Lê Thị Phương