

NHÃN SẢN PHẨM LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Orchid

Model: KT-ORCHID

Xuất xứ: Việt Nam

Số phiếu công bố:

Số lô SX : 0422

Ngày sản xuất : Xem trên bao bì

Hạn sử dụng : 05 năm kể từ ngày sản xuất

Thông số kỹ thuật

Màu sắc: trắng hoặc màu khác

Thành phần cấu tạo:

- Phần thân khẩu trang cấu tạo gồm 4 lớp được làm bằng vải không dệt không hút nước và lớp vi lọc thấu khí không thấm nước.
- Thanh nẹp mũi: Bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi.
- Dây đeo: dùng loại dây chắc chắn có tính đàn hồi tốt như: dây thun mềm, giúp cho việc đeo tháo khẩu trang dễ dàng, thoải mái khi sử dụng.

Công dụng:

Ngăn ngừa khói bụi, không khí ô nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, nơi tập trung đông người, các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng thẩm mỹ, môi trường công nghiệp độc hại.

- Mở nếp gấp để tạo một góc 1200.
- Điều chỉnh khẩu trang để mũi và cằm được che phủ hoàn toàn, kéo quai đeo vòng qua tai.
- Tạo nếp xung quanh sống mũi.
- Kiểm tra có khe hở không, điều chỉnh khẩu trang cho ôm khít khuôn mặt.

Cảnh báo an toàn:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn hoặc khi bao bì không còn nguyên vẹn.
- Tránh xa khu vực có lửa hoặc có nguy cơ bắt lửa.
- Không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa lửa, để xa tầm tay trẻ em.

Công ty sản xuất và phân phối: CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Thôn Kim Lũ, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.