


## Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

Tel: +86-574-8778 6632  
Fax: +86-574-8778 6644  
info@greatcare.cn

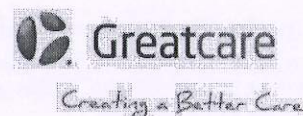

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY OXY HAI NHÁNH

#### CHỈ ĐỊNH

Sử dụng khi cần cung cấp khí oxy thông qua đường mũi.

LƯU Ý: sản phẩm dùng 1 lần – không tái sử dụng.

Nguồn oxy phải tuân theo các quy định hiện hành.

Sản phẩm phải được gắn và sử dụng bởi các chuyên viên.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cẩn trọng luôn hai đầu nhánh của dây oxy vào hai lỗ mũi và tiến hành như mô tả được kèm bên trong mỗi sản phẩm

Giữ hai đầu nhánh ở đúng vị trí và đưa phần dây hai nhánh trái phải luôn qua tai đi xuống phía dưới cằm. Điều chỉnh dây bằng vòng nhựa

Cắm đầu nối vào nguồn oxy. Khi đã đặt sản phẩm xong, mở nguồn cung cấp oxy và điều chỉnh lượng khí oxy theo yêu cầu.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có.

#### CẢNH BÁO

Nếu thiết bị được sử dụng lại, trái ngược với hướng dẫn hiện tại, điều này có thể ảnh hưởng đến những điều sau:

1. Biến đổi nguyên vật liệu
2. Dây không còn tiệt trùng và có thể có dư lượng sinh học có thể gây nhiễm trùng chéo. Làm mất các tính năng ban đầu của sản phẩm. Trước khi kết nối với nguồn oxy hãy kiểm tra lại sản phẩm. Việc vô tình đè bẹp dây oxy sẽ làm khí oxy không lưu thông đúng cách và có thể làm hỏng ở các đầu nối. Do đó, người dùng nên kiểm tra cẩn thận. Cũng phải chú ý đến các loại dây oxy được cung cấp lưu lượng oxy ổn định nhưng nguy cơ mất oxy vẫn tồn tại mặc dù có giảm thiểu.

#### LƯU TRỮ

Sản phẩm đóng gói phải được lưu trữ ở nhiệt độ từ 0°C đến 50°C và độ ẩm từ 20% - 80%

#### BẢO ĐẢM - THÔNG BÁO

FIAB đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ Chỉ thị 93/42 / EEC và được sản xuất theo quy trình của Hệ thống chất lượng FIAB được chứng nhận ISO 13485.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về chi phí y tế, thiệt hại trực tiếp do thiếu chức năng hoặc hoạt động sai của các sản phẩm trên khi sử dụng khác với hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên báo cáo bất kỳ sự cố hoặc lỗi nào của sản phẩm nếu có đến bộ phận Dịch vụ đảm bảo chất lượng của FIAB.

#### TIÊU HỦY

Rác thải từ bệnh viện phải được tiêu hủy tuân theo các quy định hiện hành.



**Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.**

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

Tel: +86-574-8778 6632

Fax: +86-574-8778 6644

info@greatcare.cn



Creating a Better Care

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY OXY

### Hướng dẫn sử dụng

a Loại dây oxy chỉ sử dụng một lần. Sau khi lấy ra khỏi bao bì, dây oxy sẽ được sử dụng ngay và tiêu hủy ngay sau khi sử dụng;

b Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng;

c Bảo quản tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao, tránh khí độc và thoáng khí tốt

d Các sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, mỗi sản phẩm phải được kiểm tra đúng theo tiêu chuẩn trước khi giao hàng;

e Thời hạn sử dụng sản phẩm là 5 năm kể từ khi tiệt trùng.



*Cao Xuân Quỳnh Anh*