

yuewell



YEG60D
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử

Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

730160-3E




JIANSHI YUWEI MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
Sales Center Address: Hanyuan East Road No.1, Xuzhang
Senhuawei Park, Kunming, Jiangsu Province, P.R. China, 210000
Manufacturing Address: Jiangyong Industrial Park
Dangyang, Jiangsu Province, P.R. China, 212300
http://www.yuewell.com

Hướng dẫn thao tác


Vui lòng làm theo các bước như hiện thị dưới đây

Mở nguồn

Kết nối nguồn điện

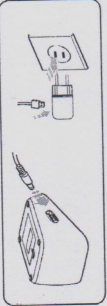

Hoặc lắp 4 pin AA

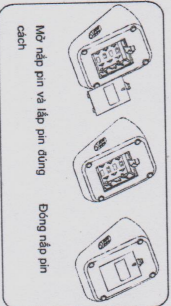

(Vui lòng lật đậy trang 12 để xem chi tiết)

Hướng dẫn thao tác

Đeo

1. Sử dụng đai quấn
Đeo đai quấn và để mép dưới đai nằm trên khuỷu
tay làm 2-3cm, giữ cho ống hơi nằm ở mặt trong
cánh tay. (Vui lòng lật đậy trang 18 để xem chi tiết)



2. Tư thế đo

Nghỉ nhàng, giữ cho phần giữa của đai quấn ngang
hàm với tim. (Vui lòng lật đậy trang 17 để xem chi
tiết)



3. Bắt đầu đo


Nghỉ yên trong khoảng 5 phút và sau đó ấn nút
" " để đo.
(Vui lòng lật đậy trang 18 để xem chi tiết)

Mục lục

Trước khi sử dụng	01
Các tính năng sản phẩm	02
Hướng dẫn thao tác	02
Kết cấu sản phẩm	05
Các bộ phận	06
Thần trọng	09
Phạm vi áp dụng và các mức cần quan tâm	10
Lắp đặt pin	12
Cài đặt đơn vị	13
Phương pháp đo	13
Sử dụng đai quấn	14
Tư thế đo	16
Bắt đầu đo	17
Chỉ số báo phạm vi huyết áp	22
Chức năng bộ nhớ	23
Chức năng đo phụ trợ	26
Chỉ số tim	27
Chỉ số đo	27
Các vấn đề thường gặp	29
Các vấn đề thường gặp của đo huyết áp	29
Lỗi thường gặp và cách khắc phục	33
Bảo dưỡng	35
Tính năng và thông số kỹ thuật	37

Tính năng sản phẩm

⊕ **Nhắc nhở IHB**
(Nhịp tim không đều)

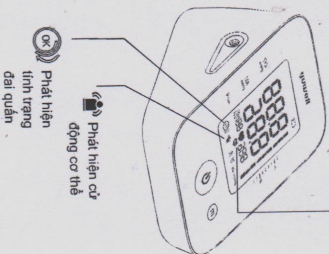


⊕ **Phát hiện cử**
động cơ thể


⊕ **Phát hiện**
lình trạng
đai quấn

Kết cấu sản phẩm

1. Bộ phận chính

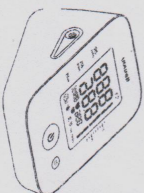

2. Đai quấn

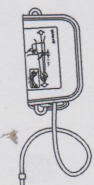

3. Phụ kiện

Hướng dẫn sử dụng, Thẻ bảo hành, 4 pin AA

