

Hướng dẫn sử dụng (Dụng cụ làm khô ống tủy răng)

Cán "tay" để có thêm khả năng thấm hút

- **Khả năng thấm hút cao**
- **Chiều dài được đánh dấu có sẵn**
- **Kích thước lớn và có sẵn gói**
- **Mã màu**

IN ĐỊNH ĐỊNH VÀ TÍCH MỤC

Côn giấy được sử dụng để làm ống hút trước khi thử nghiệm và làm sạch, ống tủy sẽ được bịt kín trong điều trị nội nha.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đo chiều dài ống tủy
2. Lựa chọn kích thước côn giấy phù hợp kích thước ống tủy.
3. Sử dụng côn giấy để làm khô ống tủy.
4. Khoảng 10 ~ 15 côn được sử dụng cho mỗi ống tủy
5. Trám bít ống tủy bằng xi măng sau khi sử dụng côn giấy.

LỜI KHUYẾN

1. Nên sử dụng côn giấy đã được tiệt trùng.
2. Không sử dụng các côn bị cong hoặc đứt gãy
3. Nên cẩn thận để tránh quá chóp hoặc không gian chết khi trám bít xi măng
4. Sử dụng ngay lập tức khi trám bít.
5. Sau khi sử dụng côn giấy, nên được giữ ở nơi mát mẻ
6. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời
7. Không sử dụng lại để nhiễm chéo.

(Nhiễm trùng thứ cấp như nấm bệnh và vi rút làm nước bọt và máu gây ra)

KHO

Bảo quản ở nhiệt độ phòng 1 °C ~ 30 °C (33 °F ~ 86 °F)

HẠN SỬ DỤNG

5 năm kể từ ngày sản xuất.

KÍCH THƯỚC SẴN CÓ














Thể loại	Kích thước
Tiêu chuẩn hóa (Thông số kỹ thuật ISO)	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Không chuẩn hóa (Kích thước phụ kiện)	XX-Fine, X-Fine, Fine, Medium, Coarse, X-Coarse, Kích thước Protaper (F1 ~ F5)
Côn đặc biệt (.04, .06, .08)	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 55, 60, 70, 80

CÁC THÀNH PHẦN

- Có sẵn bao bì

1. 6 ngăn - Mã số: P.21 / Điểm đóng gói thông thường: 60/200 điểm
2. Dạng kiểu trượt - Mã số: P.71 / Điểm đóng gói thông thường: 60/200 điểm
3. 6 Đóng gói lọ (Vuông) - Mã: P.31 / Điểm đóng gói thông thường: 60/200 điểm
4. 6 Đóng gói lọ (Tròn) - Mã số: P.31 / Điểm đóng gói thông thường: 60/200 điểm
5. 4 ngăn - Mã số: P.51 / Điểm đóng gói thông thường: 200 điểm
6. Ô vi - Mã: P.61 / Điểm đóng gói thông thường: 180/200 điểm

Ký hiệu

	Us	Sử dụng bởi
	Ba	Mã lô
		Tiệt trùng bằng chiếu xạ
		Đại diện được ủy quyền tại EC
	Co	Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Do	Không sử dụng lại
	Do	Không hấp tiệt trùng lại
	Me	Nhà sản xuất
	Me	Ngày sản xuất
	Da	Tránh xa ánh sáng mặt trời
	Ke	Giới hạn nhiệt độ
	Te	CE — Đánh dấu và số nhận dạng của cơ quan được thông báo.
		Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị Thiết bị Y tế 93/42/EEC