

OPEN

**TOP CARE**

**MẶT NẠ KHÔNG THỞ LẠI**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

1. Đặt mặt nạ lên mặt bệnh nhân, trùm lên cả mũi và miệng. Dây đeo ở dưới tai và quanh cổ
2. Nhẹ nhàng điều chỉnh mặt nạ cho thoải mái và vừa vặn.
3. Điều chỉnh kẹp mũi ở sống mũi cho vừa khít.
4. Gắn đầu còn lại của dây oxy vào nguồn oxy

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.  
No. 138 Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone  
315336, Ningbo, Zhejiang Province, P.R. China

Shanghai International Holding Corp.  
GmbH(Europe)Elffestrasse 80, 20537  
Hamburg, Germany

Size: Pediatric Elongated

LOT 19615

2019-12

CE 0120  **STERILE EO** MADE IN CHINA

2024-11

**GIÁM ĐỐC**



*Cao Xuân Quỳnh Anh*