


Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

Tel: +86-574-8778 6632
Fax: +86-574-8778 6644
info@greatcare.cn

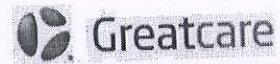

Creating a Better Care

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY CHO ĂN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dây cho ăn được tiệt trùng, sử dụng một lần được sản xuất với nhiều kích cỡ từ nhựa PVC y tế. Dây cho ăn có bốn mắt ở vị trí cuối dây. Dây cho ăn được sử dụng bằng cách đưa trực tiếp vào dạ dày thông qua khoang mũi và thực quản.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/CHỈ ĐỊNH

Dây cho ăn là sản phẩm y tế được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân những người mà không thể cung cấp dinh dưỡng bằng đường miệng, không thể nuốt một cách an toàn, hoặc cần bổ sung dinh dưỡng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định.

CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG

- Nên được sử dụng bởi những chuyên gia y tế
- Chỉ sử dụng một lần
- Không sử dụng nếu đóng gói tiệt trùng đã mở hoặc bị hỏng
- Không sử dụng sau ngày hết hạn dùng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở bao bì và lấy dây cho ăn ra
- Đặt dây cho ăn ở cuối lưỡi và từ từ luồn vào trong
- Đảm bảo rằng dây cho ăn nằm trong dạ dày (bằng cách chuẩn đoán phía trên bụng sau khi bơm 20ml khí vào trong dây)
- Cố định đầu gần của ống với băng keo vải hoặc dụng cụ cố định đặc biệt
- Kiểm soát ống bơm tiêm
- Sau khi cho ăn, rửa dây cho ăn với 30-50ml nước và đóng nắp của đầu nối lại
- Sau thao tác rút dây ra thì dùng chất sát khuẩn để lau chùi

THẬN TRỌNG

- Chỉ sử dụng một lần.
- Vô trùng nếu bao bì chưa bị mở và không bị hỏng.
- Lưu trữ nơi khô thoáng.



GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Quỳnh Anh

