

## Humer Decongestionnant Rhume

### □ MÔ TẢ

Chai 20ml

**Thành phần:** CAPTOMUCIL®, nước, sodium saccharin, sodium chloride, hương bạc hà, dex-panthneol, sodium methyl parahydrobenzoate.

### □ ĐẶC TÍNH

**Humer Decongestionnant Rhume** được sản xuất với công thức độc đáo CAPTOMUCIL (chờ cấp bằng sáng chế) – có thành phần từ chitosan polysaccharide có nguồn gốc tự nhiên. Humer Decongestionnant Rhume giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp nhờ 3 tác động:

- Thúc đẩy loại bỏ dịch tiết dư thừa: khi được hòa trộn với mucin trong mũi theo một tỉ lệ tương ứng, CAPTMUCIL có thể loại bỏ độ nhớt của dịch tiết.
- Dung dịch ưu trương CAPTMUCIL giúp tăng cường tác dụng thông mũi: giúp tăng độ lỏng của chất nhầy dư thừa.
- Giúp làm dịu niêm mạc mũi bị kích ứng

### □ CHỈ ĐỊNH

HUMER DECONGESTIONNANT RHUME có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp với triệu chứng lâm sàng là tăng tiết chất nhầy, như cảm lạnh và viêm mũi – bao gồm cả viêm mũi dị ứng và viêm mũi cấp tính hoặc mãn tính.

### □ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1-2 xịt mỗi lỗ mũi, 3-4 lần mỗi ngày

Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: 1-2 xịt mỗi lỗ mũi, tối đa 1-2 lần mỗi ngày

Trẻ em dưới 12 tuổi: chỉ sử dụng sản phẩm khi có chỉ định của bác sĩ.

### □ CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

#### Tác dụng phụ

Không xảy ra tác dụng phụ nếu sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo, trừ trường hợp kích ứng với thành phần. Nếu triệu chứng vẫn kéo dài sau 5-7 ngày sử dụng, tham khảo ý kiến của bác sĩ.

### **Tương tác với sử dụng thực phẩm chức năng và thuốc**

Đối với thành phần của Humer Decongestionnant Rhume, chưa ghi nhận có sự tương tác nào giữa sản phẩm với thực phẩm chức năng hoặc thuốc. Tuy nhiên, khuyến cáo nên sử dụng Humer Decongestionnant Rhume ít nhất 1 tiếng trước hoặc sau khi sử dụng thuốc cho mũi. Tham khảo ý kiến của dược sĩ khi sử dụng sản phẩm trong trường hợp sử dụng đồng thời với thuốc điều trị.

### **Cảnh báo và thận trọng**

Không sử dụng sản phẩm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ trong trường hợp sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Không sử dụng quá liều khuyến cáo

Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 30 ngày.

Sản phẩm có thể bị giảm tác dụng trong trường hợp viêm xoang kết hợp với polyp mũi

Không sử dụng khi bị kích ứng với sản phẩm

Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm

Trong trường hợp xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn, tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Do bản chất của sản phẩm, cảm giác châm chích nhẹ có thể xuất hiện trong khi dùng hoặc sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm.

Rửa sạch vòi xịt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn giấy sau khi sử dụng.

### **Hạn sử dụng**

Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn được in trên bao bì

Hạn sử dụng được áp dụng cho sản phẩm trong bao bì còn nguyên vẹn

Không sử dụng sản phẩm quá 1 tháng sau khi mở nắp.

### **Tiêu hủy**

Tiêu hủy sản phẩm phải được thực hiện theo quy định quản lý rác thải của địa phương

Không vứt bỏ sản phẩm hay bao bì ra ngoài môi trường.

### **□ BẢO QUẢN**

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt, nguồn sáng. Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ từ 15 đến 25°C.

## □ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Đặc tính kỹ thuật
pH	5.50-5.90
Khối lượng riêng	0.990-1.030 g/ml
Độ thẩm thấu	550-820 mOsM/Lt
Định lượng Chitosan	$\geq 0.187$ mg chitosan/puff (0.13ml) ( $\geq 90\%$ ) Giá trị lý thuyết: 0.208 mg chitosan/puff (0.13ml)
TAMC	< 100 CFU/ml
TYMC	<10 CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa	Không có
Staphylococcus aureus	Không có
Hạn dùng	36 tháng

## □ TÌNH TRẠNG PHÁP CHẾ

Tại liên minh Châu Âu, “Humer Decongestionnant Rhume” là trang thiết bị y tế loại IIa, đã được cấp CE marked.

**Nhà sản xuất pháp lý:** SIIT srl – via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – Ý

**Nhà phân phối:** Laboratoires URGO HEALTHCARE – 42 rue de Longvic – 21300 CHENOVE – PHÁP

® *CAPTOMUCIL*: nhãn hiệu được đăng ký bởi SIIT