

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ

Địa chỉ: A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM

Ngày tháng năm

**Thiết bị:** Bộ Laser hỗ trợ phôi thoát màng (Oxtax Navilase)

Hãng sản xuất: Vitrolife GmbH

Nước sản xuất: Đức


Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Hiệu chỉnh tiêu cự và hiệu chuẩn kích thước lỗ, cường độ của tia laser. Bước này cần thực hiện đầy đủ và cẩn thận ngay từ lúc thiết lập và cài đặt hệ thống.

Bước 2: Chuẩn bị đĩa thao tác laser thoát màng cho phôi.

Bước 3: Tiến hành dùng tia laser thoát màng cho phôi.

- 3.1. Chọn lựa thấu kính tia laser
- 3.2. Định vị vào vị trí màng trong suốt của phôi
- 3.3. Kích hoạt tia laser bằng cách chọn lựa loại tia laser, chỉ là Navilase
- 3.4. Nhập thông số thời gian bắn xung và kích thước lỗ
- 3.5. Ấn vào nút bắn tia laser
- 3.6. Quan sát và ghi nhận kết quả

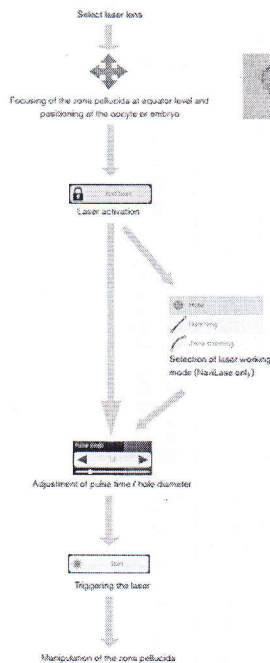

Hình 1: Nguyên lý về quy trình dùng laser để hỗ trợ phôi thoát màng.



Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



*Đ. Quang Tuyên*

