



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM**

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel : (84) 24 3553 5450 Fax: (84) 24 3553 5450  
Mail : [info@hnvietnam.com.vn](mailto:info@hnvietnam.com.vn) Web: <http://hnvietnam.com.vn>

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Sản Phẩm:** Kim dẫn đường cho dụng cụ kim sinh thiết Coaxial needle

**Mã Sản Phẩm:** CExxxx-yy-zz; CVxxxx-yy-zz; COxxxx-yy-zz; CCxxxx-yy-zz; CBxxxx-yy-zz;  
CUxxxx-yy-zz; CFxxxx-yy-zz; CMxxxx-yy-zz; CAxxxx-yy-zz; CXxxxx-yy-zz; CTxxxx-yy-zz;

**Nhà Sản Xuất:** Medax Srl Unipersonale/Ý

**Xuất Xứ:** Ý



- Kiểm tra hạn sử dụng.
- Lấy kim dẫn đường khỏi ống bảo quản.
- Điều chỉnh độ dài lấy mẫu của kim.
- Chọc vào đúng vị trí cần lấy mẫu tế bào.
- Rút kim ra và đóng nắp đi kèm lại. Khi lấy mẫu thì rút nắp ra.
- Đưa kim chọc hút tế bào và can thiệp vào kim dẫn đường hết chiều dài đã điều chỉnh.
- Rút kim sinh thiết đã lấy mẫu ra.
- Rút kim dẫn đường ra và băng lại vết lấy mẫu.
- Lấy mẫu mô sinh thiết cho vào lọ chứa dung dịch cố định mẫu.
- Chuyển mẫu đến khoa Giải phẫu bệnh hoặc khoa xét nghiệm có chuyên môn.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Nhật Quân*