



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84) 24 3553 5450

Fax: (84) 24 3553 5450

Mail : info@hnvietnam.com.vn

Web: <http://hnvietnam.com.vn>


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Kim sinh thiết tủy xương

Model/ Mã Sản Phẩm: Neo Oxus/Mã: NXxxxxyy-zz; ENxxxxyy-zz;

Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý

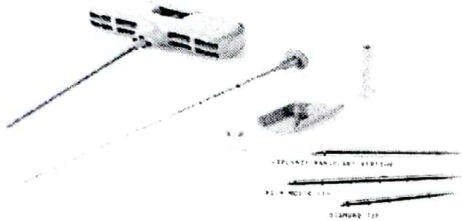

- Đưa kim gồm cả kim thông vuông góc với bề mặt xương.
- Từ từ xoay kim và ấn kim về phía trước tới khi vào tới khoang tủy
- Rút kim thông
- Ấn tiếp kim 2-3cm bằng chuyển động quay
- Từ từ đưa kim thông có chia vạch để xác định chiều dài mẫu tủy rồi rút kim thông
- Rút kim lên vài milimet rồi lại ấn lại ở góc khác, chuyển động này sẽ cho phép mẫu tủy nằm trong kim.
- Đóng phần tay cầm bằng nút vận có sẵn
- Rút kim ra hoàn toàn và chậm bằng chuyển động quay
- Lấy mẫu tủy trong kim ra bằng cách đưa dụng cụ (extraction cannula) từ phía tay cầm vào rồi nối nắp an toàn với đầu xa của ki, dùng que lấy mẫu đẩy mẫu về phía tay cầm, đưa cả “extraction cannula” ra, mẫu nằm gọn trong “extraction cannula” và không bị tổn thương.

ĐẠI DIỆN HỢP TIẾP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân