



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84) 24 3553 5450

Fax: (84) 24 3553 5450

Mail : info@hnvietnam.com.vn

Web: <http://hnvietnam.com.vn>

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Dụng cụ sinh thiết mô mềm bán tự động

Model/ Mã Sản Phẩm: Bio-Feather/BFxyyy-zz

Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý



Hướng dẫn sử dụng:

- Đưa kim vào vị trí bằng cách kéo cò súng về phía sau, chú ý có 02 nấc lấy mẫu, định lấy mẫu dài 15mm hoặc 22mm thì kéo chốt về đúng vị trí ghi trên thân súng.
- Đưa kim dẫn đường vào vị trí ranh giới với vùng cần lấy mẫu mô khi kim đã ở vị trí sẵn sàng. Cần thận không ấn vào cò súng cho tới khi kim đã vào vị trí.
- Từ từ đẩy cò súng bằng ngón cái tới vị trí dừng đầu tiên nhằm mục đích đẩy kim chọc vào vùng lấy mẫu, rất cần trọng để không ấn cò trong quá trình này. Ấn cò, kim thông sẽ sập lại và giữ mẫu mô trên phần chứa mẫu của kim chọc.
- Đưa kim ra ngoài, kéo cò lại, đẩy kim chọc ra để lấy mẫu mô.
- Khi thủ thuật hoàn thành, bỏ các vật dụng thực hiện thủ thuật theo đúng qui trình xử lý rác thải y tế của bệnh viện

ĐẠI DIỆN HỢP ĐΙΑP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân