




**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM**  
Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel : (84) 24 3553 5450 Fax: (84) 24 3553 5450  
Mail : [info@hnvietnam.com.vn](mailto:info@hnvietnam.com.vn) Web: <http://hnvietnam.com.vn>

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Kim dây định vị u vú  
Model/ Mã Sản Phẩm: Sinurep/Mã: SRxxxyyy-zz;  
Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý

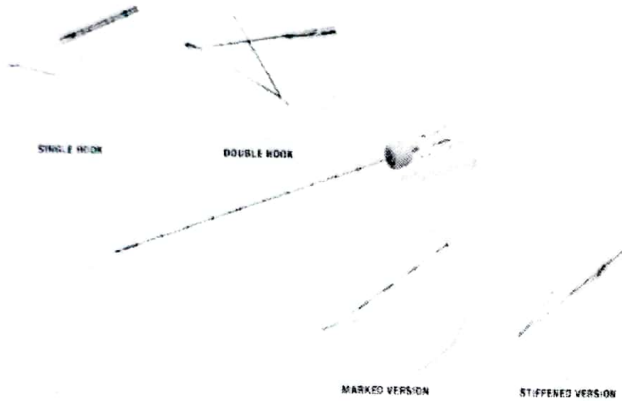

- Dây móc J-Type và O.
- Đầu nhọn atraumatic cực kỳ sắc bén.
- Điều trị phản xạ đối với các thủ thuật có hướng dẫn siêu âm.
- kim được đánh dấu các nấc, độ sâu của dây
- Kiểm tra hạn sử dụng.
- Đưa kim với móc vào mô u vú và tiến hành đo độ sâu của khu vực u cần định vị.
- Tháo kim để mở và cố định móc. Giữ vòng dây cho đến khi phần u cố định không xuất hiện.
- Khi kết thúc quy trình, hãy tháo tất cả các thiết bị và phụ kiện chú ý đến các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho khả năng vật liệu bị ô nhiễm.
- Thải bỏ sau khi sử dụng cùng với chất thải bệnh viện tuân theo luật chất thải y tế.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

*Trần Nhật Quân*