

Đông Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ÁO PHẪU THUẬT (ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT, ÁO CHOÀNG PHÒNG DỊCH)

1. **Mô tả:**

- Áo phẫu thuật (áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch) được làm chủ yếu từ vải không dệt có tính năng chống thấm nước, cồn, chống tĩnh điện, không cho vi khuẩn xuyên qua, là rào cản vật lý ngăn cản máu, dịch tiết... Được gấp theo nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn rất dễ sử dụng.
- Thường được đóng gói cùng khăn thấm

2. **Công dụng:**

Dùng trong các ca phẫu thuật – thủ thuật y tế, trong thăm khám, phòng dịch...

3. **Hướng dẫn sử dụng:**

- Kiểm tra ngoại quan sản phẩm, chỉ thị tiệt trùng, hạn sử dụng.
- Mở sản phẩm
- Luồn hai tay vào cánh tay áo phẫu thuật (áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch) đồng thời bung áo ra
- Người phụ tá kéo áo về sau, cột dây áo, gài miếng gai dính ở cổ. Lưu ý chỉ được tiếp xúc ở mặt trong của áo tránh nhiễm khuẩn.
- Cột dây phía trước: Sau khi mang găng tay, cầm miếng bìa và rút dây, cột lại dây áo phía trước

4. **Hướng dẫn khác:**

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng sản phẩm
- Không sử dụng khi bao bì có dấu hiệu hư hỏng, chỉ thị tiệt trùng không đổi màu theo quy định
- Sản phẩm phải được bỏ vào khu vực rác thải y tế và xử lý theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHẠM ANH TUẤN