

Kim chọc hút trứng bằng máy có van

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Các bước sử dụng

- Bóc bao bì sản phẩm và kiểm tra tính toàn vẹn của kim
- Rửa sạch kim và ống tiêm với môi trường chuyên dụng phù hợp với kim chọc hút.
- Định vị đầu dò âm đạo để hình dung buồng trứng và các nang
- Xác định vị trí các mạch máu trong và xung quanh buồng trứng và xác định quỹ đạo trực tiếp đến các nang để chọc hút.
- Đưa kim vào hướng dẫn của đầu dò âm đạo, tiến hành chọc hút trứng
- Sau khi hoàn thành thủ thuật chọc hút, rửa kim bằng dung dịch thích hợp để đảm bảo không còn tế bào trứng bên trong ống hoặc kim.
- Bỏ kim vào một hộp đựng thích hợp và tuân theo quy trình xử lý chất thải.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải Anh