

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẰNG TIẾNG VIỆT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ VÀ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số nhà 16, Ngõ 2 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 20 tháng 03 năm 2022

Hệ thống siêu âm Doppler màu kỹ thuật số:

Model: P50 Exp, P50 Pro, P50S, P50, P47, P50 Plus, P50 VO, P55N, P40 Exp, P40 Pro, P40S, P40, P37, P40 Plus, P40N, P45N, P30 Exp, P30 Pro, P30S, P30, P27, P30 Plus, P30N, P35N, S60 Exp, S60, S60 Pro, S60 VO, S60 Maso, S59, S70N, S50S, S50 Plus, S50 Elite, S55, S40 Exp, S40 Pro, S40, S35, S30 Exp, S30 Pro, S30, S25, M30, S30s, S29s, S26s, S25s, S22s, S20s, S15s, S50 Exp, S50, S50 Pro, S40 Plus, S-Maso, S50 CV, S50 VO, P60 Exp, P60 Pro, P60, P60 CV, P70T, P70S, P60S, P60 VO, P55, P55 Elite, P55S, P50T, P50 Elite, P50E, P40T, P40, Elite, P40E, P30T, P30 Elite, P30E, P25S, P22S, S20 Exp, S20 Pro, S20, S15, M15, E5 Exp, E5, E5 Pro, E3 Exp, E3, E3 Pro, E2 Exp, E2, E2 Pro, E1 Exp, E1, E1 Pro, S70 Exp, S70, S70 Pro, S70S, S70 VO, S60S, S60N, S22 Exp, S22 Pro, S22, S20 Plus, M22, S-REVO, S12 Exp, S12 Pro, S12, S11 Plus, M12, S10, S10 Pro, S10 Plus, S11s, M11s, S11v, S12s, P20, P20 Pro, P15, P22, P25, P10 Plus, P30VO, P40VO, X3 Exp, X3, X3 Pro, X3 Plus, X2 Plus, X1 Exp, X1, X1 Pro, P10 Exp, P10 Pro, P10, P18, P16, P12, P11, M10, P9 Exp, P9 Pro, P9, E30s, E40s, S60 Expert, S60 Classic, S60 Nov, S60 Super, S60 Speci, S60 Elite, S-Light.

Hãng sản xuất: sonoscape medical corp.

Nước sản xuất: Trung Quốc

Hướng dẫn sử dụng:

- Khởi động máy.
- Thiết lập thông tin bệnh nhân ở mục dữ liệu bệnh nhân. Ấn phím “Patient” khi có bệnh nhân mới.
- Điều chỉnh các thông số đo từng bộ phận cần thiết, bôi Gel siêu âm vào da, bộ phận cần siêu âm. Sau đó áp đầu dò vào vị trí đã bôi gel đó.
- Khi trên màn hình hiển thị hình ảnh rõ nét bộ phận cần siêu âm, ấn “FREEZE” để dừng hình. Nhấn “FREEZE” lần 2 để thoát dừng hình.
- Ấn nút “ZOOM” để phóng to ảnh. Ấn nút “Reprot” sau khi đóng băng để thực hiện chức năng báo cáo. Để điền vào các lưu ý ấn “PREVIEW”, ấn “PRINT” để in ra ngoài hoặc muốn đóng lại thì ấn phím “close”.
- Tắt máy
- Lưu ý:
 - Sau khi tắt máy, chờ 2 phút sau mới khởi động lại để bảo quản máy tốt hơn.
 - Khi tháo lắp đầu dò: Nên thực hiện trước khi khởi động máy hoặc ấn phím “Probe” để chọn đầu dò rồi mới cắm đầu dò.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng