



<b>TÊN SẢN PHẨM</b>	Dung dịch rửa máy điện giải
<b>Số danh mục</b>	1030165
<b>Dung tích</b>	200ml chất tẩy rửa Nonionic (Triton™ X-100, 0.1%)



### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để rửa đường ống của máy điện giải Biolyte V, hệ thống máy tích điện phân.

### CHUẨN BỊ VÀ ỔN ĐỊNH REAGENT

Thuốc thử đã sẵn sàng để sử dụng và ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn, khi được bảo quản ở 15 ~ 30°C.

### THÔNG TIN SỬ DỤNG

Cùng hai tuần một lần hoặc khi đã phân tích hơn 500 mẫu.

Bấm: "Clean Flow Path" rồi đưa Dung dịch rửa máy điện giải đến kim hút, máy sẽ tự hút dung dịch và tiến hành rửa các đường ống của hệ thống



P/N : MA9010178-02 A1



**BioCARE Corporation**

4F., No.12, Ln. 5, Sec. 2, Nanshan Rd., Luzhu Dist.,  
Taoyuan City 33852, Taiwan



**MedNet GmbH**

Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany