

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên máy: Máy nâng cơ bằng công nghệ HIFU

Chủng loại: Liftera-V

Chủ sở hữu: Asterasys- Xuất xứ: Hàn Quốc



Việc bật hoặc tắt không đúng quy trình có thể dẫn đến hư hỏng hoặc máy không hoạt động đúng tính năng.

Khi sử dụng máy **Liftera-V**, các bước bật và tắt máy được tuân theo sự hướng dẫn sau:

Bật máy

- 1 Kết nối dây nguồn, dây cáp và khay đựng đầu Cartridge.
- 2 Bật công tắc nguồn chính ở sau máy.
- 3 Bật công tắc nguồn ON/OFF bên phải máy.
- 4 Gắn đầu Cartridge vào đầu dây cáp và tiến hành điều trị.

Tắt máy

- 1 Tắt công tắc nguồn ON/OFF bên phải máy.
- 2 Tắt công tắc nguồn chính ở sau máy.
- 3 Vệ sinh, khử trùng và cất đầu Cartridge đã sử dụng.
- 4 Phủ bao trùm chống bụi lên máy (nếu có).

CẢNH BÁO

- Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy.
- Lưu ý trong quá trình sử dụng không để gấp khúc, gấp cáp dây Cartridge.
- Luôn để tay cầm thẳng đứng khi test và khi tiếp xúc bề mặt da.
- Luôn cho gel đầy đủ đầu cartridge

Đặt bảng hướng dẫn ở gần thiết bị hoặc treo trên máy

QUY TRÌNH SỬ DỤNG

1. Bật công tắc nguồn chính phía sau máy và công tắc ON/OFF bên phải máy.
2. Gắn đầu Cartridge phù hợp.
3. Điều chỉnh mức năng lượng tương ứng với các loại đầu Cartridge điều trị.
4. Tiến hành quá trình điều trị.
5. Phải bấm nút Stand by trước khi tắt máy hoặc thay cartridge.
6. Tắt công tắc On/Off.
7. Tắt công tắc chính sau máy.
8. Phủ bao trùm.

❖ Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật
028. 62908200

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



WARUT PANGPOMMA