

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DÂY THỞ LƯU LƯỢNG CAO QUA MŨI

Cố định thiết bị bằng cách gắn ở phía sau máy theo hướng từ trên xuống vào kẹp của giá đỡ.

Nhấn và giữ khóa nơi đặt làm bình làm ấm, đặt bình làm ấm trên đĩa gia nhiệt với đầu vào không khí hướng về phía trước, trượt bình làm ấm về phía trước và đốt gia nhiệt với đầu không khí hướng về phía trước, trượt bình làm ấm về phía trước và chốt sẽ đóng khi bình làm ấm được lắp vào hoàn toàn.

Cắm dây truyền vào túi nước cất, đảm bảo Valve giảm áp lực được mở.


Thay bộ lọc: Vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp bộ lọc, đặt một màng lọc mới vào trong khoang. Vặn theo chiều kim đồng hồ để đóng và cố định lắp bộ lọc đúng vị trí.

Kết nối dây thở tích hợp dây đốt điện với bình làm ấm.

Kết nối cảm biến nhiệt độ và cấp gia nhiệt: Gắn cáp kết nối tại cổng có màu tương thích trên thiết bị; gắn đầu cắm 6 chân với dây thở.

Chọn và gắn gọng mũi phù hợp cho từng bệnh nhân.

**GIÁM ĐỐC**

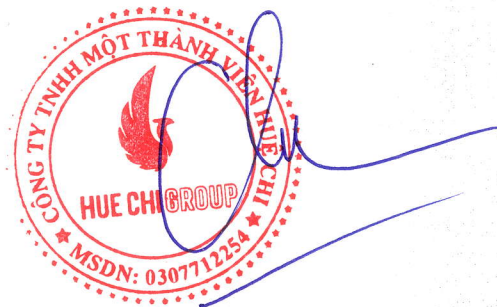

**Nguyễn Thị Huệ Chi**