

CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI & SẢN XUẤT VLS
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mục đích sử dụng:

Sử dụng để bảo vệ, giúp nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, vi-rút ở môi trường ở khả năng lây nhiễm cao trong quá trình khám, chữa bệnh hoặc tham gia phòng chống dịch bệnh.

2. Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Xìt khuẩn tay trước khi sử dụng

Bước 2: Mặc áo choàng, buộc dây phía cổ áo (dán nhám dính), buộc dây phần thắt lưng.

Bước 3: Đeo bao giày

Bước 4: Vệ sinh lại tay sau khi sử dụng

Lưu ý:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn, không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao.
- Sử dụng an toàn khi bao gói nguyên vẹn
- Sản phẩm sử dụng 01 lần, nghiêm cấm tái sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của công ty



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Hoạt