

BỘ LỌC VI KHUẨN- VI RÚT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chú ý: Sách hướng dẫn này liên quan đến Lọc vi khuẩn 140101 và Lọc vi khuẩn 140201

SỐ REF: 140101,140201

MỤC ĐÍCH:

Các bộ lọc này được sản xuất như bộ lọc Vi khuẩn-vi rút. Bộ lọc vi khuẩn-vi rút thường được gắn vào thiết bị gây mê hoặc hô hấp trước khi dây thở/ gây mê được lắp đặt. Sau khi lọc, dây thở/ gây mê bệnh nhân được lắp đặt. Các hạt có hại bị giữ lại với tỷ lệ 99,9% nhờ đặc tính lọc và ngăn không cho đi vào đường hô hấp.

BAO GỒM: Lọc vi khuẩn

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG:

Chỉ sử dụng một lần. **KHÔNG SỬ DỤNG LẠI, KHÔNG TRIỆT TRÙNG.** Tái sử dụng, xử lý hoặc khử trùng có thể làm giảm tính toàn vẹn về cấu trúc của thiết bị và / hoặc gây ra thương tích hoặc bệnh tật cho bệnh nhân do thiết bị bị trục trặc. Việc tái sử dụng hoặc xử lý có thể tạo ra nguy cơ nhiễm bẩn cho thiết bị và / hoặc nhiễm trùng cho bệnh nhân và do đó có thể dẫn đến việc lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Sự nhiễm bẩn của thiết bị có thể dẫn đến bệnh tật cho bệnh nhân và người sử dụng do nhiễm trùng. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho một bệnh nhân.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra cẩn thận thiết bị để xác minh rằng bên trong hoặc bao bì vô trùng của nó không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. **KHÔNG SỬ DỤNG** nếu bị hư hỏng. Vui lòng trả lại ngay sản phẩm bị hỏng cho đại lý hoặc Plasti-med.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Các bộ lọc nên được thay thế khi bị bẩn, nếu không, chúng nên được thay tối đa sau mỗi 48 giờ .

BIẾN CHỨNG:

Đảm bảo rằng các kết nối của bộ lọc là đúng và không có rò rỉ khí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Xác định đầu vào thở vào hoặc thở ra của thiết bị mà bộ lọc vi khuẩn-vi rút sẽ được gắn vào.
2. Gắn bộ lọc vi khuẩn-vi-rút theo cách thích hợp vào đầu vào thiết bị mà bạn đã xác định.
3. Đảm bảo bộ lọc vi khuẩn-vi rút được gắn đúng vào thiết bị.
4. Sau khi gắn bộ lọc vi khuẩn-virus vào thiết bị, hãy đặt dây thở hoặc gây mê ở đầu kia của bộ lọc.
5. Sau 24 giờ sử dụng, hãy tháo bộ lọc vi khuẩn-vi rút ra khỏi thiết bị và thay bộ lọc mới.

HẠN SỬ DỤNG: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần , nên được thay đổi tối đa 24 giờ một lần.

