

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LỌC ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP

MÃ HÀNG: 141 102, 141 103

MỤC ĐÍCH: Bộ lọc là bộ lọc vi khuẩn/vi-rút dùng một lần được thiết kế để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm sinh học xâm nhập vào thiết bị kiểm tra chức năng hô hấp.

ĐÓNG GÓI: Lọc đo chức năng hô hấp có đầu ngậm elip; lọc đo chức năng hô hấp hình tròn

QUI TRÌNH

1. Lấy ra khỏi túi.
2. Kiểm tra hư hỏng và xử lý ngay nếu bị hư hỏng.
3. Kết nối an toàn với thiết bị phổi.
4. Nếu bao gồm, kết nối miệng túi với lỗ nhỏ trên bộ lọc.
5. Sau khi sử dụng, thải bỏ đúng cách

CẢNH BÁO: Việc sử dụng bộ lọc này và miếng dán miệng (nếu có) chỉ giới hạn ở một bệnh nhân, một phiên. Không dành cho việc tái xử lý. Nó không được sử dụng với bệnh nhân mới phát.

Không ngâm, rửa, rửa, khí hoặc hơi nước để khử trùng sản phẩm này. Dịch tiết của bệnh nhân và làm ướt bằng dung dịch làm sạch hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng có thể làm giảm sức đề kháng và hiệu quả của bộ lọc này.

THẬN TRỌNG: Luật liên bang (Hoa Kỳ) hạn chế việc bán thiết bị này theo đơn đặt hàng của bác sĩ.

PLASTI-MED Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Sti
Deni OSB Mah. Yan Sanayi Cad. No:13 Tuzla-İSTANBUL-TURKEY
Tel: +90(216) 591 04 91 (Pbx) Fax: +90(216) 591 04 90



Giám Đốc
Trần Doãn Quân

