

**Tờ hướng dẫn sử dụng: EASYDERM BAND**

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
*Trưởng văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical  
Co., Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh*



*Mr. Cha JunWoo*

## Miếng dán mụn EasyDerm BAND

### [Mô tả]

EasyDerm Band là một loại băng gạc hydrocolloid có độ nhớt, được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương và bảo vệ vết thương, bao gồm một lớp bên ngoài là màng polyurethane có thể điều chỉnh sự bay hơi nước và một lớp hydrocolloid có độ nhớt tiếp xúc với vết thương, hấp thụ dịch tiết và bảo vệ vết thương.

### [Thành phần]

Màng polyurethane phủ chất kết dính hydrocolloid.

### [Chỉ định]

EasyDerm Band được chỉ định để bảo vệ và hấp thụ dịch tiết vết thương.

### [Chống chỉ định]

1. Các vết thương sâu, cơ, xương hở hoặc gân.
2. Các vết thương bị nhiễm trùng (vết thương bất thường như sưng đỏ, chảy mủ, sốt và phù nề).

### [Hướng dẫn sử dụng]

1. Rửa sạch vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý thông thường và lau khô.
2. Đảm bảo da sạch và khô, không bôi kem.
3. Cắt sản phẩm lớn hơn vết thương, bỏ màng phim bảo vệ và dán lên vết thương.
4. Ấn nhẹ để sản phẩm bám chắc.
5. Sản phẩm này nở ra và chuyển sang màu trắng sau khi hấp thụ dịch tiết. Dùng sản phẩm này để hấp thụ hoàn toàn dịch tiết.
6. Khi sản phẩm không còn trương nở hoặc dịch rỉ ra ngoài, hãy loại bỏ sản phẩm và thay thế bằng sản phẩm mới.
7. Mỗi lần dán một miếng, một hoặc nhiều lần trong ngày.
8. Khi tháo, nhấn một đầu của sản phẩm và nhẹ nhàng kéo nó lên cùng một lúc.

### [Cảnh báo/ Thận trọng]

1. Sản phẩm dùng một lần và không được tái sử dụng.
2. Sản phẩm có bao bì bị hư hỏng hoặc không đủ niêm phong có thể có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Vui lòng không sử dụng chúng.
3. Kiểm tra hạn dùng của sản phẩm, và không sử dụng sản phẩm bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn.

### [Tác dụng phụ]

Trong trường hợp phát ban, sốt, dị ứng hoặc nhiễm trùng trong quá trình sử dụng sản phẩm này, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.

### [Hạn sử dụng]

36 tháng



**[Bảo quản]**

1. Sản phẩm dùng một lần và không được tái sử dụng.
2. Ngăn ánh sáng trực tiếp và độ ẩm.
3. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (1~30°C)

**[Đóng gói]**

- 15 miếng/ hộp
- 27 miếng/ hộp
- 57 miếng/ hộp

