

Mẫu nhãn lưu hành TTBYT tại Việt Nam

Tên trang thiết bị: Khẩu trang y tế

Chủng loại/ Mã sản phẩm: MEDIFIT KF94

Số seri (hoặc lô sản xuất):

Số lưu hành trang thiết bị y tế:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Quy cách đóng gói:

Hướng dẫn sử dụng:

1. Kiểm tra mặt tiếp xúc với mặt nạ không bị nhiễm khuẩn
2. Giữ phần có ghim và đeo để che mũi và miệng
3. Đeo dây đeo vào tai để cố định vị trí
4. Đảm bảo không có khoảng trống để có thể chạm hoàn toàn vào khuôn mặt

Lưu ý:

1. Không sử dụng ở nơi kín có nồng độ oxy dưới 18%
2. Không dùng khẩu trang khi đang dùng những loại khẩu trang khác hoặc đang dùng khăn giấy, những thứ tương tự ...
3. Không sử dụng khi bên trong khẩu trang bị nhiễm bẩn
4. Không làm biến dạng phần mềm của khẩu trang
5. Không được giặt khẩu trang
6. Những đối tượng như phụ nữ có thai, bệnh nhân bị bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, trẻ em, người già nên ngưng sử dụng khi thấy dấu hiệu khó thở do đeo khẩu trang hoặc hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần

Bảo quản: nơi khô ráo, nhiệt độ từ 1~30 độ.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Hãng sản xuất: K-SOLUS CO., LTD

Địa chỉ: 381, Poseoungjangan-ro, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT: CÔNG TY TNHH MTV VINAKET

Địa chỉ: Căn hộ số 3309, Tòa W1, chung cư Vinhomes West Point, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



GIÁM ĐỐC

KIM MINGI