

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khẩu trang y tế

MEDIFIT KF94

### THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM:

1. Tên sản phẩm: **Khẩu trang y tế ( MEDIFIT KF94)**
2. Số lượng: 50 chiếc (đóng gói riêng).
3. Chất liệu: Vải không dệt, polypropylene (thanh mũi), Sợi Nylon.
4. Nơi sản xuất: Hàn Quốc.
5. Nơi đổi trả hàng: Nơi mua sản phẩm.
6. HSX: In trên bao bì.
7. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ từ 1~30 độ.
8. HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .
9. Nhà sản xuất: K-SOLUS CO., LTD.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Kiểm tra mặt tiếp xúc với mặt nạ không bị nhiễm khuẩn
2. Giữ phần có ghim và đeo để che mũi và miệng
3. Đeo dây đeo vào tai để cố định vị trí
4. Đảm bảo không có khoảng trống để có thể chạm hoàn toàn vào khuôn mặt

### CHÚ Ý:

1. Không sử dụng ở nơi kín có nồng độ oxy dưới 18%
2. Không dùng khẩu trang khi đang dùng những loại khẩu trang khác hoặc đang dùng khăn giấy , những thứ tương tự ...
3. Không sử dụng khi bên trong khẩu trang bị nhiễm bẩn
4. Không làm biến dạng phần mềm của khẩu trang
5. Không được giặt khẩu trang
6. Những đối tượng như phụ nữ có thai, bệnh nhân bị bệnh hô hấp, bệnh tim mạch , trẻ em, người già nên ngưng sử dụng khi thấy dấu hiệu khó thở do đeo khẩu trang hoặc hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần