

Tên sản phẩm: AIRWAY

Mã sản phẩm: GT016-100

NK & PP: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

Địa chỉ: 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 028 3863 9201 – 028 3866 5909

Di động: 090 7146 679

Email: tbhoangkim@gmail.com

Nhà SX: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Địa chỉ NSX: 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042

Ningbo, Zhejiang Province, China.

Nước SX: Trung Quốc

Số lượng, Ngày SX, HSD: Xem trên bao bì

Qui cách đóng gói: 500 cái/ thùng

HSDS:

1. Chọn kích thước chính xác (kích thước chính xác cho bệnh nhân được xác định bằng khoảng cách giữa khố miệng và khí quản).
2. Bôi trơn và đưa vào với độ cong ban đầu hướng lên trên và sau đó xoay nửa chừng để theo độ cong của lưỡi.
3. Ở những bệnh nhân khó ăn, nó cũng có thể được đưa vào ngay từ đầu với độ cong của nó dọc theo độ cong của lưỡi.
4. Sau khi được đưa vào, điều rất quan trọng là phải hỗ trợ hàm để duy trì sự thông thoáng của đường thở

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng.

Sản phẩm này nên được sử dụng bởi nhân viên được đào tạo.

Số lưu hành:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM



Nguyễn Thị Phương Châm