

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO
HÃNG GREETMED – CHINA

| STT | Tên trang thiết bị | Mã sản phẩm | Mục đích sử dụng | Hướng dẫn sử dụng | Hãng, nước sản xuất | Hãng, Nước sản xuất |
|-----|--------------------|-------------|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | Airway các số | GT016-100 | Thông đường thở cho bệnh nhân | <p>1. Chọn kích thước chính xác (kích thước chính xác cho bệnh nhân được xác định bằng khoảng cách giữa khúc miệng và khí quản).</p> <p>2. Bôi trơn và đưa vào với độ cong ban đầu hướng lên trên và sau đó xoay nửa chừng để theo độ cong của lưỡi.</p> <p>3. Ở những bệnh nhân khó ăn, nó cũng có thể được đưa vào ngay từ đầu với độ cong của nó dọc theo độ cong của lưỡi.</p> <p>4. Sau khi được đưa vào, điều rất quan trọng là phải hỗ trợ hàm để duy trì sự thông thoáng của đường thở</p> | <p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD</p> <p>16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p> | <p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD</p> <p>16F, Building 1 No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p> |



Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Nguyễn Thị Phương Chiêm

[Handwritten signature]

