

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Dung dịch vệ sinh mũi**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Sensat Polis**

1. THÀNH PHẦN

Keo ong, Natri Chloride 0,9%, Tinh dầu khuynh diệp 0.005%, Glycerin, Natri benzoate, nước tinh khiết vừa đủ.

2. CÔNG DỤNG

- Giúp vệ sinh, làm sạch mũi, làm loãng dịch nhầy, lấy đi chất bẩn trong khoang mũi, duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở.
- Hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng: sổ mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, tắc mũi, cảm cúm, viêm mũi họng, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi sử dụng. Ấn dứt khoát, xịt trực tiếp vào khoang mũi mỗi lần 2 nhát. Xịt 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

Sản phẩm xịt có thể nuốt, không gây hại đến sức khỏe người dùng.

Đối tượng sử dụng:

- Người cần vệ sinh, làm sạch mũi hàng ngày.
- Người bị sổ mũi, nghẹt mũi, tắc mũi, chảy nước mũi, người bị viêm mũi họng, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính...
- Dùng an toàn cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2022



GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Tuyên