

CÔNG TY TNHH SX-TM VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

HƯỚNG DẪN DÙNG KHẨU TRANG Y TẾ

1. Hướng dẫn đeo khẩu trang

Hai tay cầm hai sợi thun của khẩu trang, áp sát khẩu trang vào mặt và cầm 2 sợi thun đeo vào 2 tai.

Một tay kéo phần trên của khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và chán, sau đó chỉnh thanh nẹp mũi sao cho ôm sát đồng thời tay còn lại kéo phần dưới khẩu trang cho kín cằm.

2. Lưu ý khi sử dụng

- Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Khẩu trang chỉ dùng một lần hoặc tối đa không quá 1 ngày
- Đeo khẩu trang đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không dùng khẩu trang không rõ nguồn gốc.
- Đối với khẩu trang được đóng bịch: Khi xé bịch để lấy khẩu trang sử dụng, nếu không dùng hết khẩu trang ở trong bịch đã xé, bạn nên cho lại vào bịch để dán hoặc cột kín lại.



NGUYỄN VĂN THANH