



GIÁM ĐỐC **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**
Nguyễn Ngọc Thành

Mục đích sử dụng

Ổng nghe Y khoa ERKA được sử dụng bởi các chuyên gia y tế cho mục đích chẩn đoán. Ổng nghe được dung như là thính chẩn nhờ vào việc nghe âm thanh tim phổi và các cơ quan khác của cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng :

- **Đặt ống nghe vào tai :** Các nút tai nghe phải hướng vào phía mũi
- **Điều chỉnh độ căng của tia nghe để đảm bảo chất lượng của âm thanh và thoải mái :** kéo hai quay ra xa nhau hoặc ép hai quay nghe vào nhau.
- **Màng nghe điều chỉnh âm thanh :** để nghe âm thanh tần số thấp – đặt màng nghe nhẹ nhàng lên vùng da bệnh nhân. Để nghe âm thanh tần số cao – tạo một áp lực lên màng nghe trên vùng da bệnh nhân.

Vệ sinh, khử trùng và bảo quản

Vệ sinh ống nghe vào giữa những đợt thăm khám bệnh nhân bằng cách lau cồn Isopropyl 70% hoặc dung khăn lau dùng một lần với xà phòng và nước để loại bỏ chất hữu cơ. Dung dịch tẩy trắng 2% để khử trùng ống nghe. Tuy nhiên, ống nghe có thể bị đổi màu nhẹ khi tiếp xúc với ống chất tẩy trắng.

Các màng nghe, vòng đệm chuông chống lạnh và các nút tai nghe có thể được tháo ra để làm sạch. Đảm bảo tất cả các bộ phận và bề mặt khô trước khi lắp lại. Để tránh làm tổn thương ống tai, hãy đảm bảo nút nghe đã được gắn vào tai nghe trước khi đưa ống nghe vào tai.

Để tránh gây hư hỏng cho ống nghe, không ngâm ống nghe vào bất kỳ loại chất lỏng nào, không áp dụng bất kỳ quy trình khử trùng nào đối với ống nghe hoặc để ống nghe ở nhiệt độ quá cao.