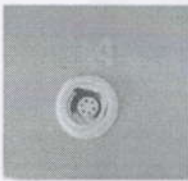
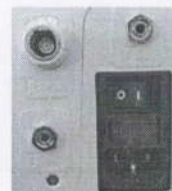


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THÂN NHIỆT HOTDOG


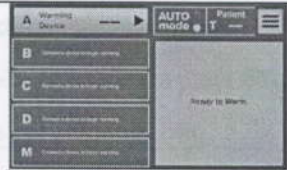
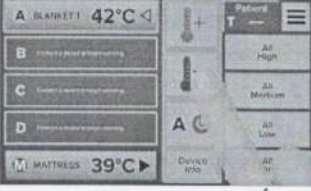
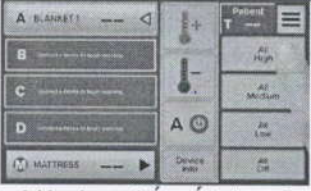
Model: WC71; WC71R; WC01/WC02; WC01R/ WC02R; WC77; WC77R; WC51/ WC52; WC51R/ WC52R
 Hãng sản xuất: Augustine Temperature Management, LLC, USA

Cổng kết nối

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Cổng A Mặt trước bộ điều khiển</p> |  <p>Cổng B, C, D Mặt sau, bên trái bộ điều khiển</p> |  <p>Cổng TTruCore (NA), T_{probe} và Tout Mặt sau, bên trái, phía dưới bộ điều khiển</p> |
|--|--|--|

Lưu ý: Khi cáp kết nối được kết nối vào Bộ điều khiển, xuất âm thanh báo hiệu cảm biến quá nhiệt và điện trở nhiệt đang được kết nối và hoạt động bình thường. Cổng sẽ khả dụng trên màn hình cảm ứng

Điều khiển thiết bị bằng màn hình cảm ứng:



| | |
|--|---|
|  <p>Khi cáp kết nối được kết nối vào Bộ điều khiển, xuất hiện âm thanh báo hiệu cảm biến quá nhiệt và điện trở nhiệt đang được kết nối và hoạt động bình thường. Cổng sẽ khả dụng trên màn hình cảm ứng</p> |  <p>Chạm vào biểu tượng được đang sáng để kích hoạt.</p> |
|  <p>Tấm gia nhiệt sáng màu xanh lá là tấm gia đang được chọn. Để cài đặt nhiệt độ, sử dụng phím “nhiệt kế +” để tăng nhiệt độ hoặc “nhiệt kế -” để giảm nhiệt độ. Tắt cổng kết nối bằng cách ấn phím “nguồn màu đỏ”.</p> |  <p>Mỗi tấm gia nhiệt được kết nối cho phép điều chỉnh riêng biệt. Các biểu tượng khi truy cập phím “☰” bên phải màn hình cho phép điều chỉnh đồng thời nhiệt độ tại tất cả các cổng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức Cao - Mức Trung bình - Mức thấp - Tắt |

Khi kết thúc quá trình giữ ấm bệnh nhân, chuyển Công tắc Nguồn chính sang TẮT
 Sau khi sử dụng, ngắt kết nối Bộ điều khiển khỏi ổ cắm điện.



Đang chờ 1/40

Tổng quan màn hình điều khiển
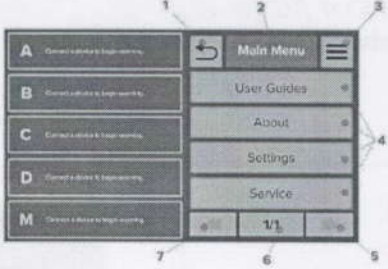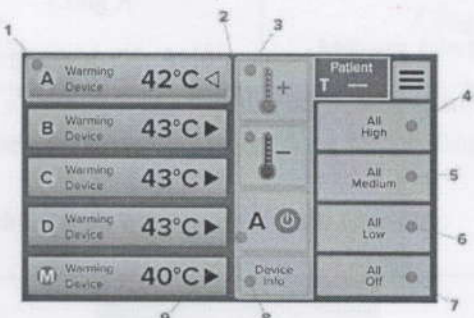
| | |
|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Quay lại 2. Tên menu cài đặt 3. Menu chính 4. Menu phụ 5. Trang sau 6. Trang hiện tại 7. Trang trước |
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tắm gia nhiệt được chọn (viền xanh lá) 2. Giảm nhiệt độ tắm gia nhiệt 3. Tăng nhiệt độ tắm gia nhiệt 4. Đặt tắt cả các tắm gia nhiệt ở nhiệt độ cao 5. Đặt tắt cả các tắm gia nhiệt ở nhiệt độ trung bình 6. Đặt tắt cả các tắm gia nhiệt ở nhiệt độ thấp 7. Tắt tắt cả các tắm gia nhiệt 8. Xem thông tin tắm gia nhiệt đã chọn 9. Tắt tắm gia nhiệt đã chọn |
| <p>Thông tin hiển thị:</p> <p>A. Không ấn mạnh xuống. Điều này là không cần thiết.</p> <p>B. Găng tay quá dày có thể làm giảm độ nhạy trên màn hình cảm ứng.</p> <p>C. Độ ẩm trên màn hình có thể làm hệ thống làm việc không ổn định; đảm bảo màn hình khô trước khi sử dụng.</p> | |

