

Hướng dẫn sử dụng

Lưỡi dao phẫu thuật

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:

Được dùng trong phẫu thuật, bóc tách giải phẫu trong các thủ thuật phẫu thuật khác nhau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chọn kích cỡ sao phù hợp. Lấy lưỡi dao khỏi gói nhôm, tiến hành đặt lưỡi dao vào rãnh của cán dao cho tới khi cố định và có thể tiến hành sử dụng.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:


- Chỉ sử dụng một lần; Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Kiểm tra hạn sử dụng trước khi sử dụng.
- Kiểm tra trực quan và kiểm tra kỹ sản phẩm, bao bì trước khi sử dụng. Vận chuyển và xử lý không đúng cách có thể gây ra hư hỏng cấu trúc và / hoặc chức năng cho thiết bị hoặc bao bì.
- Sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở bao bì.
- Sản phẩm không được gia công lại, bỏ đi sau khi sử dụng.
- Sản phẩm nên được sử dụng bởi bác sĩ / người hành nghề đã đăng ký hoặc y tế.
- Bảo quản trong điều kiện mát và khô. Bảo vệ khỏi nhiệt độ quá cao hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Đảm bảo vứt bỏ sản phẩm đúng cách sau khi sử dụng.

SẢN PHẨM CỦA: Ribbel International Ltd.

Địa chỉ: 20TH Mile, Đường Jatheri, P.O. Rai, Sonapat, Haryana 131029, Ấn Độ.

CHỦ SỞ HỮU SỔ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - NHÀ NHẬP KHẨU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA.

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

TỔNG GIÁM ĐỐC



BS. Bùi Hữu Hiền