

# Golanil SPRAY ORALE

**COMPOSIZIONE:** acqua demineralizzata, estratto glicerico di Propoli (*Propolis*), estratto secco di Salvia (*Salvia officinalis*, maltodestrina), estratto secco di Aloe vera (*Aloe barbadensis*, maltodestrina), estratto di Mirra (*Commiphora myrrha*, maltodestrina), estratto secco di Acerola (*Malpighia glabra*, maltodestrina) titolato al 25% in vitamina C, olio essenziale di Salvia (*Salvia officinalis*), conservante: potassio sorbato; olio essenziale di Menta (*Mentha piperita*), olio essenziale di Timo (*Thymus vulgaris*), acidificante: acido citrico; sucralosio, polivinilpirrolidone, gomma xantana.

Il prodotto non contiene glutine.  
Dispositivo medico con Aloe da agricoltura biologica.

**MODO D'USO:** Agitare prima dell'uso. Utilizzare l'apposito applicatore somministrando da 3 a 4 erogazioni nel cavo faringeo; a seconda dell'esigenza è possibile ripetere l'applicazione fino a 4-5 volte durante la giornata.

**AVVERTENZE:** non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia verso uno o più componenti. Flacone in vetro con nebulizzatore spray. Prima dell'uso assicurarsi che l'erogatore sia perfettamente inserito sul flacone.

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Lotto e usare entro il: vedi fondo della confezione.

**REF** 8723NA

| ASTUCCIO  | ETICHETTA | FOGLIETTO | FLACONE  | EROGATORE |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 21<br>PAP | 205<br>PP | 22<br>PAP | 72<br>GL | 205<br>PP |
| CARTA*    | PLASTICA* | CARTA*    | VETRO*   | PLASTICA* |

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
\*Verificare le disposizioni del proprio comune

f. 589

# Golanil SPRAY ORALE



CALMA  
L'IRRITAZIONE

PROTEGGE  
LA GOLA

ALLEVIA  
IL DOLORE

DISPOSITIVO MEDICO CE

Pharmalife  
RESEARCH



# Golanil SPRAY ORALE

**Golanil Spray Orale** è un dispositivo medico. Grazie alla sinergia dei suoi ingredienti è un coadiuvante specifico ad azione protettiva filmogena per il trattamento degli stati irritativi della gola che possono essere causati da stati di raffreddamento, allergie o da contatto con agenti esterni (quali ad esempio fumo, smog, polvere); allevia i sintomi correlati come secchezza, bruciore, dolore e difficoltà di deglutizione.

**Golanil Spray Orale**

- Crea un **film muco-adesivo** con effetto "barriera" ed esplica un'azione protettiva sulla gola irritata.
- **Protegge la mucosa faringea** riducendo la sensibilità agli attacchi esterni soprattutto in quelle situazioni in cui si è maggiormente esposti a condizioni ambientali offensive per la gola, favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
- **Dona una piacevole sensazione di freschezza** grazie alla presenza degli oli essenziali.

Pharmalife Research s.r.l.  
Via Casa Paradiso 2/A  
23846 Garbagnate Monastero (LC) - Italy

**Golanil Spray Orale** è un dispositivo medico classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/42/CEE

Pharmalife Research s.r.l. produce secondo le norme GMP Good Manufacturing Practices Code of Federal Regulation Title 21 - Food and Drug Administration. Azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, UNI EN ISO 22000 e UNI EN ISO 22716.

30 ml e



18723NA  
ITA006

Golanil  
SPRAY ORALE

# Golanil SPRAY ORALE



CALMA  
L'IRRITAZIONE

PROTEGGE  
LA GOLA

ALLEVIA  
IL DOLORE

DISPOSITIVO MEDICO CE

Pharmalife  
RESEARCH