

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Xịt mũi họng

Chủng loại/mã sản phẩm: NANO SPRAY 24H

1. THÀNH PHẦN

Natri chloride, Benzalkonium chloride, Silver nano, Tinh dầu khuynh diệp, Nước tinh khiết.

2. CÔNG DỤNG

Giúp làm sạch, làm thông thoáng khoang mũi, họng, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm VA, viêm xoang và viêm mũi dị ứng.

Hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập gây tổn thương ở mũi, miệng, họng. Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng ngứa họng, đau rát họng, khản tiếng, mất tiếng do ho kéo dài, viêm họng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

- Lắc đều bình xịt trước khi sử dụng. Đưa lên mũi họng, hơi ngửa đầu và ấn nhẹ vòi xịt để dung dịch đi sâu vào khoang mũi, họng. Xịt thẳng vào mũi họng 2 lần/ngày. Mỗi lần 2-3 lần xịt.

Đối tượng sử dụng:

- Người có nguy cơ và người đang bị viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, viêm xoang.
- Người có các biểu hiện cảm lạnh, cảm cúm như: hắt hơi, sổ mũi, ngứa họng, đau rát họng, ho do thay đổi thời tiết. Người cần phòng ngừa các vấn đề đường miệng, mũi.
- Sản phẩm dùng được cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ sơ sinh từ 3 tháng tuổi.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 08 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Lương Đình Quân