

ISE MID Standard

TÊN: ISE MID Standard

CODE: 204-125

ĐÓNG GÓI: 2000mL

ỨNG DỤNG: Kết hợp với máy phân tích sinh hóa loạt, được sử dụng để pha loãng mẫu, được sử dụng để hiệu chuẩn tham chiếu sau mỗi chu kỳ điện phân..

THÀNH PHẦN: Organic Buffer, Antibacterial Agent

TÌNH TRẠNG: Chất lỏng trong suốt.

ỔN ĐỊNH BẢO QUẢ: Lưu trữ ở 2oC ~ 40oC ở nơi sạch sẽ, tránh bị ép.

THỜI GIAN CÓ GIÁ TRỊ: 12 tháng, Sau khi mở thuốc thử có thể ổn định trong 90 ngày..

INSTRUMENT MODEL: Máy phân tích dòng Roche.

YÊU CẦU MẪU: **Huyết thanh hoặc huyết tương.**

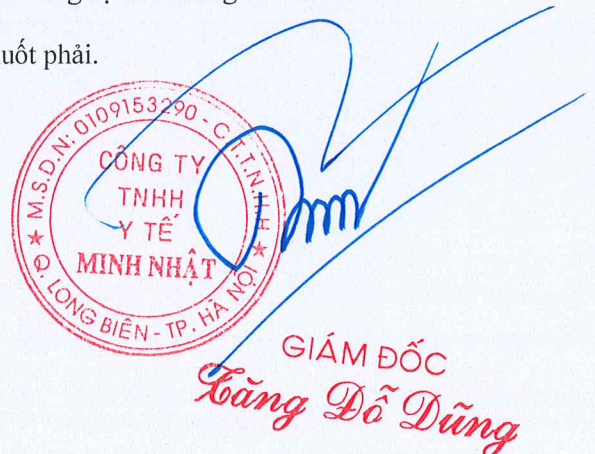
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG: 1. Mở nắp hộp chứa.

2. Đặt đường ống của dụng cụ vào thùng chứa, và sau đó thắt chặt nắp.
3. Theo hướng dẫn vận hành, thay thế bằng chất pha loãng mới.

CẢNH BÁO: 1. Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro.

2. Nếu sản phẩm đã được đông lạnh một phần hoặc hoàn toàn, hãy để sản phẩm ấm đến nhiệt độ phòng và trộn đều.
3. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc da, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng với nhiều nước.
4. Gây nôn và tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp nuốt phải.
5. Xử lý nước thải theo quy định của địa phương.

NGÀY SẢN XUẤT & LÔ SỐ: Xem nhãn hoặc bên ngoài gói.


GIÁM ĐỐC
Trương Đỗ Dũng