

Hướng dẫn sử dụng

- Hướng dẫn sử dụng:

Có bóng:

1. Trước khi đặt nội khí quản, xả hơi hoàn toàn vòng hít.
2. Sau khi đặt nội khí quản, bơm hơi vòng hít lên bằng thể tích không khí tối thiểu để làm kín hiệu quả.
3. Ngay sau khi lạm phát vòng hít, nghe tim thai cả hai trường phổi. Nếu âm thanh khoeo giảm đi, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu.
4. Việc đặt ống nội khí quản nên được xác nhận bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi.

Không bóng:

1. Đặt ống nội khí quản cần được xác nhận bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi.
2. Nếu âm thanh hơi thở giảm dần trên một trường phổi hoặc không có trên một hoặc cả hai trường, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu.

- Cảnh báo và thận trọng:

1. Chỉ sử dụng một lần.
2. Vô trùng nếu gói đã mở hoặc bị hư hỏng.
3. Không khử trùng lại
4. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối.