

PHIẾU BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Dưới đây là nội dung thông tin ghi trên phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Thời hạn bảo hành | 01 năm kể từ ngày mua | |
| Ngày mua | Ngày..... tháng..... năm..... | |
| Thông tin khách hàng | Họ tên | |
| | Địa chỉ | |
| | Số điện thoại | |
| Nhà xuất khẩu | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHEONGUNG | |
| | Địa chỉ | 55 Seungandong Gil, Heungeop Myeon, Wonju Si, Gangwon do, Republic of Korea |
| | Số điện thoại | (033)743-3418 |
| Nhà nhập khẩu và phân phối | CÔNG TY TNHH HANAVINA | |
| | Địa chỉ | Số nhà 35 ngõ 12 Quang Trung, Tổ dân phố 7, Khu đấu giá 4A, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội |

- Sản phẩm đã được kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất kho
- Hư hỏng phát sinh trong tình trạng bình thường sẽ được bảo hành miễn phí trong vòng 01 năm kể từ ngày mua theo chính sách của tổng công ty
- Khi phát sinh hư hỏng vui lòng mang theo phiếu bảo hành đến cửa hàng đã mua sản phẩm hoặc liên hệ với bộ phận A/S để được tư vấn và hướng dẫn
- Nếu quá hạn thời gian bảo hành mọi vấn đề phát sinh khách hàng phải chịu chi phí sửa chữa.
- Tuy nhiên, nếu trong những trường hợp dưới đây dù còn thời gian bảo hành khách hàng vẫn phải chịu chi phí sửa chữa:
 - Lỗi phát sinh do sự bất cẩn, sử dụng sai phương pháp của người sử dụng (di chuyển sản phẩm, rơi, va đập, vò, hoạt động quá mức)
 - Lỗi phát sinh do sử dụng sản phẩm trong môi trường không thích hợp
 - Hư hỏng do người sửa chữa không phải là người có chuyên môn của công ty
 - Hư hỏng do người sử dụng tự ý sửa chữa, tái tạo, tháo lắp sản phẩm.
 - Hư hỏng do sử dụng sai nguồn điện.
 - Hư hỏng do lỗi của dụng cụ tiếp xúc.
 - Hư hỏng do thiên tai, (thoá hoạn, lũ lụt, ảnh hưởng khí gas, động đất, bão, sét...)
- Phiếu bảo hành sản phẩm này chỉ được phát hành một lần duy nhất.
- Phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm này nếu trong trạng thái trống không điền thông tin khách hàng thì sẽ không có hiệu lực.
 - Trường hợp chưa điền thông tin thì nhất định phải điền kỹ đến thông tin tại nơi mua sản phẩm.
- Bảo quản phiếu bảo hành cẩn thận để được hưởng đầy đủ các dịch vụ sau bán hàng. 

Cheongung Sub Line.

www.cheongung.com

LP-450




본 제품은 '의료기기'입니다.

 (주)천궁의료기

TÊN VÀ CẤU THÀNH SẢN PHẨM

Thân máy

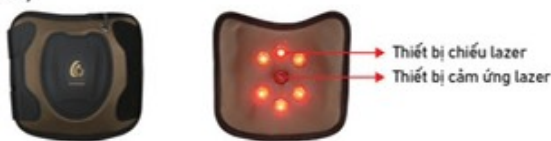

Bộ phận điều khiển



PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

- Mục đích sử dụng

Là thiết bị sử dụng laser chiếu trực tiếp vào da được chiếu với mục đích làm giảm chứng đau.
- Hạng mục chuẩn bị trước khi sử dụng
 - Phải hiểu chỉ tiết hướng dẫn sử dụng sản phẩm
 - Kiểm tra xem thiết bị có chỗ nào bị hư hỏng hay không?
- Phương pháp vận hành
 - Sau khi lắp đai vào thân máy, đặt máy vào nơi cần điều trị và kéo căng phần dây máy ra.
 - Đặt phần cần trị liệu vào giữa thân máy và đai bảo vệ sau đó sử dụng đai cố định.
 - Kết nối công tắc nguồn điện.
 - Cài đặt nhiệt độ, laser, hẹn giờ bằng bảng điều khiển.
 - Nếu dùng sử dụng, hoạt động của nhiệt và laser sau khi kiểm tra nút tắt OFF, ngắt kết nối thiết bị từ người sử dụng.
 - Nếu dùng sử dụng, tháo ổ cắm nguồn điện.
- Phương pháp sử dụng
 - Laser
 - Người sử dụng sau khi kiểm tra vị trí công tắc thân máy, đặt cố định thân máy vào vị trí người sử dụng có thể chạm được đến công tắc.
 - Nếu ấn nút "laser" của bảng điều khiển, đèn báo laser sáng lên và tia laser được chiếu.
 - Nhiệt
 - Nếu nhấn "nút nhiệt" của bảng điều khiển, đèn báo nhiệt độ sáng lên và nhiệt được phát ra.
 - Xoay "nút xoay điều chỉnh nhiệt độ" cài đặt nhiệt độ mong muốn.
 - Hẹn giờ:

Ấn "nút hẹn giờ" cài đặt hẹn giờ từ 1 tiếng đến 8 tiếng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Tuyệt đối tránh chiếu tia laser vào mắt.
- Tắt nút nguồn sau khi sử dụng.
- Tuyệt đối không sử dụng tay ướt để cầm phích 220V.
- Không được đặt các vật có nhiệt quanh thiết bị nguồn.
- Khi sử dụng cần lưu ý không làm rơi hoặc tác động quá mạnh vào sản phẩm.
- Trong quá trình sử dụng, nếu sản phẩm phát sinh vấn đề, tuyệt đối không tự ý tháo hoặc sửa chữa. Liên hệ với trụ sở sửa chữa của công ty để được giúp đỡ.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Bảo quản tại nơi thích hợp để tránh các tác động ngoài không cần thiết.
- Người sử dụng sau khi gắn thiết bị vào vùng khớp đau, hãy nhấn nút laser ở bảng điều khiển.
- Khuyến khích sử dụng sản phẩm chủ yếu ở vùng đầu gối (có thể sử dụng như tấm nệm).

CÁCH BẢO QUẢN VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

- Tránh sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm ở những nơi đông người hay phức tạp
- Bảo quản sản phẩm ở những nơi thoáng mát, tránh không để nước vấy lên sản phẩm
- Bảo quản thiết bị tại nơi thoáng mát
- Sau khi sử dụng nên rút nguồn của thiết bị
- Tránh sử dụng sản phẩm tại nơi ẩm thấp, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao
- Lưu ý không va chạm mạnh vào thiết bị
- Sử dụng thiết bị tại nhiệt độ phòng từ -20 độ C đến 60 độ C, độ ẩm 20% đến 90%
- Lau chùi, vệ sinh sản phẩm bằng khăn ẩm và làm khô thiết bị
- Lau chùi và vệ sinh bằng điều khiển và ổ cắm bằng khăn khô

CHI TIẾT SẢN PHẨM

| Tên sản phẩm | Máy chiếu xạ laser y tế |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tên model | LP - 450 |
| Số giấy phép sản xuất | Số 5145 |
| Số chứng nhận sản xuất | Số 05-960 |
| Mã số sản xuất, ngày sản xuất | Có ghi trên sản phẩm |
| Đóng gói, khối lượng | 1 chiếc / 470g |
| Đơn vị về điện | AC220V, 60Hz, 50VA |
| Cấp độ laser bởi IEC 60825-1(2001) | 3A |
| Công ty bán hàng | Công ty Choengung Medical CO.,LTD |
| Số điện thoại | (033)743-3418 |

☞ Sản phẩm này là một thiết bị y tế điện* Cần đọc kỹ "Hướng mục chú ý khi sử dụng" và "Phương pháp sử dụng" trước khi dùng sản phẩm. ☞