

Số: 04052022

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ÁO CHOÀNG Y TẾ
Chủng loại: MD01

1. Mô tả

- Bộ mũ áo choàng dạng liền và bao giầy được sản xuất từ chất liệu vải SMS/PPE, kháng thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch, dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ, các viên chắc chắn, kín khít và không có lỗi ngoại quan.

=> *Bộ áo choàng y tế đạt cấp độ bảo vệ level 2*

2. Hướng dẫn sử dụng:

- Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi sử dụng;
- Xé bao nylon, cởi khóa trước ngực, mặc bộ trang phục;
- Sản phẩm sử dụng 1 lần;
- Sau khi dùng xong, tháo bộ đồ, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ ngay vào thùng chất thải;
- Lưu ý chọn kích cỡ phù hợp với người sử dụng;
- Vệ sinh tay sau khi tháo bỏ đồ bảo hộ

3. Cảnh báo và thận trọng:

- Không nên lựa chọn bộ đồ quá rộng hoặc quá chật
- Sử dụng an toàn khi bao gói không bị hở hoặc rách và còn hạn sử dụng
- Không sử dụng sản phẩm với mục đích khác

4. Điều kiện bảo quản:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

