

Công ty TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS

VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội

Đc: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh,
p.Phương Mai, q.Đống Đa, Hà Nội.

Medical Master



Hướng dẫn sử dụng Đèn đọc phim X-quang

1. Mô tả chung

Dòng sản phẩm Đèn đọc phim X-quang Medical-Master sử dụng đèn xenon để cung cấp nguồn sáng đồng bộ với tuổi thọ kéo dài và hạn chế tiêu thụ điện năng.

2. Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện	90~240V, 50/ 60 Hz
Công suất	15W
Nguồn sáng	LED
Kích thước tổng thể	MS-28: 410 x 490 x 100 mm MS-29: 770 x 490 x 100 mm MS-30: 1100 x 510 x 100 mm MS-31: 1490 x 510 x 100 mm

3. Gắn tường

Đèn đọc phim được treo lên tường bằng các ốc vít tương ứng với các lỗ bố trí mặt sau của đèn.

Lựa chọn vị trí lắp đèn ở gần ổ cắm điện. Bắt các ốc-vít phù hợp lên tường, bố trí nằm ngang, và tương ứng với khoảng cách giữa các lỗ trên đèn đọc phim. Treo đèn đọc phim lên các ốc-vít đó.

4. Vận hành

Kết nối dây nguồn từ ổ cắm tiêu chuẩn 13A đến công nguồn chuẩn IEC ở mặt bên phải của đèn đọc phim. Công tắc nguồn nằm ở góc dưới, bên phải đèn đọc phim.

Tắt đèn đọc phim khi nó không được sử dụng, và rút ổ cắm nguồn nếu đèn đọc phim không được sử dụng trong một thời gian dài.



5. Bảo dưỡng

Đèn đọc phim cần được vệ sinh bằng một miếng vải mềm và màn hình cần được lau nhẹ nhàng bằng dung dịch cồn, sau đó lau khô.

Không sử dụng các vật liệu có thể ăn mòn hoặc các dung môi hữu cơ như hóa chất tẩy rửa hay Etylen để vệ sinh đèn đọc phim.

