



# HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Model: R120, R210, R310, R600, R700

1 2 3 4 5  
Tinh chỉnh

## NÓI

Thật dễ dàng để điều khiển giọng nói với chỉ một tay.

**KHÔNG CẦN DỤNG CỤ NÀO CẢ.**

**Đầu có thể điều chỉnh trên cùng:** Xoay để tinh chỉnh âm thanh nếu cần. **CẢNH BÁO** – điều chỉnh đầu này quá mức sẽ gây giảm chất lượng âm điệu; vì vậy hãy chú ý cẩn thận.

**Nút Bật/Tắt:** Để nói, hãy nhấn nút này và thả ra khi nói xong.

**Núm Độ cao:** (phía bên trái) Xoay núm để điều chỉnh đến độ cao cao hơn hay thấp hơn. Không cần điều chỉnh thêm sau khi đã đạt đến mức độ cao mong muốn.

Nhấn để Bật

Nhấn để Tắt

Điều chỉnh Độ cao



**Núm Âm lượng:** (phía bên phải) Xoay núm để điều chỉnh trong khi nói để tăng hoặc giảm âm lượng nói khi muốn nhấn mạnh.

**Thực hành:** Đặt Thanh quản Điện tử Romet® vào cổ của bạn và thực hành tìm "điểm trung tâm" để đạt được thanh âm tốt nhất.

**LƯU Ý:** Điểm này có thể nằm ở nhiều nơi trên cổ hoặc bên miệng, và khác nhau ở từng người tùy thuộc vào kết cấu da và lượng phát xạ mà bạn đã nhận. Nhìn vào gương và lặp lại những câu đơn giản để có được âm rõ ràng. Nếu có thể, hãy ghi lại giọng nói của bạn và phát lại để nghe âm thanh bạn phát ra như thế nào. Thực hành thường xuyên!


## LẮP PIN



**Lắp pin:** Tháo nắp đáy pin ra khỏi thiết bị và lắp pin Lithium 9V vào ngăn pin. Có thể hoán đổi cực pin; có thể đảo ngược các cực + hoặc - của pin. Tiếp xúc điện sẽ được thực hiện tự động khi nắp ngăn được vận vào đáy ngăn.

Có thể cần dùng lực nhẹ khi lắp pin vào thiết bị lần đầu tiên. **KHÔNG DÙNG LỰC MẠNH.**

## SẠC PIN

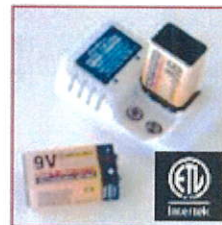

**Sạc:** Đi kèm với thiết bị Model R310 là hai pin Lithium-Ion 9V. Khi nhận được thiết bị, pin chỉ đầy khoảng 80%. Sạc đầy pin trước khi sử dụng để đạt được công suất tối đa. Cắm sạc Lithium vào mạch 110V (mạch điện 220V yêu cầu bộ điều hợp cho khu vực địa phương của bạn - **KHÔNG** đi kèm trong bộ sản phẩm).

Lắp một hoặc hai pin sạc vào sạc. Đèn LED màu đỏ = Cần Sạc. Đèn LED màu xanh lá cây = Sạc Đầy.

**CẢNH BÁO:** Chỉ sạc pin Li-Ion bằng sạc Li-Ion. **KHÔNG** cố gắng sạc chúng bằng bất kỳ sạc nào khác. **KHÔNG** đặt pin khác vào sạc, như NIMH. **Pin kiềm 9V bình thường sẽ hoạt động với thanh quản điện tử Romet®.**

GIÁM ĐỐC




Trần Quang Đức




**ROMET**<sup>®</sup>  
ELECTRONIC LARYNX

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU HỢP MIỆNG

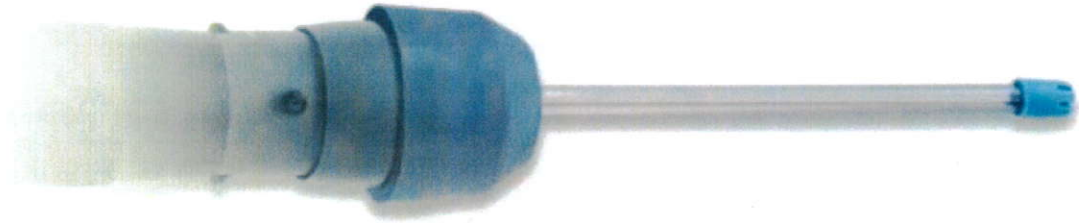

Bộ điều hợp miệng và ống đi kèm Thanh quản Điện tử Romet<sup>®</sup> sẽ cho phép bạn bắt đầu nói trong khi cổ đang lành sau khi phẫu thuật.

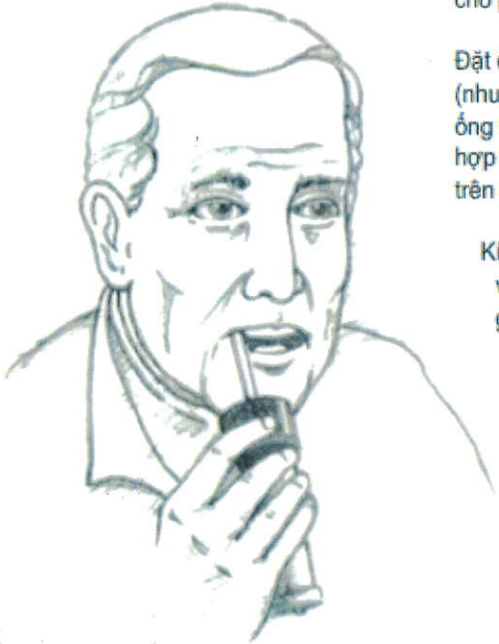

Đặt chắc chắn bộ điều hợp nắp cao su vào đầu Thanh quản Điện tử (như thể hiện ở trên). Lắp ống vào lỗ nhỏ trên đầu bộ điều hợp. Đẩy ống vào lỗ một cách chắc chắn. Ống phải cố định trong lỗ bộ điều hợp trong khi bạn nói. Đặt đầu ống vào góc miệng, chĩa đầu nhọn về trên cùng của miệng.

Kích hoạt nút bật/tắt trên Thanh quản Điện tử. Thực hành nói với nguyên âm đơn giản hoặc âm ngắn. Thử một vài câu đơn giản.

Nếu có thể, hãy nói chậm vào máy ghi âm và phát lại giọng nói của bạn

Ống trong suốt đi kèm có các đầu tip để ngăn mảnh thức ăn nhỏ dính vào ống trong khi sử dụng. Bạn có thể dễ dàng tháo đầu tip này hoặc làm ống ngắn lại bằng kéo

Sau khi nói xong, hãy rửa ống bằng nước sạch, mát. Bảo đảm làm sạch đầu Thanh quản Điện tử để loại bỏ nước bọt sót lại hoặc mảnh thức ăn nhỏ.