

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

Địa chỉ: Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng nước sản xuất: Erba Lachema S.R.O / CH Séc

TÊN SẢN PHẨM: Elite 3 HEM Control Low , đóng gói: 3 ml

Hóa chất kiểm chuẩn nồng độ thấp dùng cho máy phân tích huyết học Elite 3

1/ Mục đích sử dụng:

- Kiểm tra giá trị thấp các thông số xét nghiệm huyết học.

2/ Bảo quản:

- Sản phẩm (chưa mở nắp) ổn định theo hạn sử dụng của nhà sản xuất khi được bảo quản ở 2-8°C (Theo quy trình hướng dẫn được đóng kèm theo sản phẩm)
- Tuổi thọ của sản phẩm (khi mở nắp): 14 ngày.
- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*
- Không làm đông lạnh sản phẩm.

3/ Hướng dẫn sử dụng:

Sản phẩm là dạng máu chuẩn được đóng gói kín trong ống thủy tinh để dùng trên Máy phân tích huyết học Elite 3.

- Bỏ ống máu ra để ở nhiệt độ phòng khoảng 15 phút.
- Lắc đều và cho vào đo để kiểm tra các giá trị thấp các thông số huyết học;



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lộc Việt