

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

**Tên cơ sở đăng ký lưu hành:** Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

**Địa chỉ:** Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Hãng nước sản xuất:** Erba Lachema S.R.O / CH Séc

**TÊN SẢN PHẨM:** Elite 3 HEM Control Normal , đóng gói: 3 ml

**Hóa chất kiểm chuẩn nồng độ trung bình dùng cho máy phân tích huyết học Elite 3.**

### 1/ Mục đích sử dụng:

- Kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm huyết học.

### 2/ Bảo quản:

- Sản phẩm (chưa mở nắp) ổn định theo hạn sử dụng của nhà sản xuất khi được bảo quản ở 2-8°C (Theo quy trình hướng dẫn được đóng kèm theo sản phẩm)

- Tuổi thọ của sản phẩm (khi mở nắp): 14 ngày.

- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*

- Không làm đông lạnh sản phẩm.

### 3/ Hướng dẫn sử dụng:

Sản phẩm là dạng máu chuẩn được đóng gói kín trong ống thủy tinh để dùng trên Máy phân tích huyết học Elite 3.

- Bỏ ống máu ra để ở nhiệt độ phòng khoảng 15 phút.

- Lắc đều và cho vào đo để kiểm tra các giá trị bình thường các thông số huyết học;



**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Chế Việt*