

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA 3 NGÃ CÓ DÂY

### 1. MÔ TẢ :

- Khóa 3 ngã có dây ,Size : 10cm,25cm,50cm,75cm,100cm
- Đường kính dây nối :đường kính trong ID :2.8mm,Đường kính ngoài OD :4.5mm
- Khử trùng bằng khí Ethylene Oxide
- Chịu áp lực lên đến 4.5 bar (65 PSI) Xoay 360°
- Mũi tên màu được mã hóa chỉ hướng dòng chảy
- Xoay khóa Luer Lock để kết nối chắc chắn
- Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt..

### 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG :

- Khóa 3 ngã có dây được sử dụng với bất kỳ ống tiêm, dây truyền để hỗ trợ bơm thuốc, dịch truyền vào cơ thể bệnh nhân

### 3. CHỈ ĐỊNH : Khóa 3 ngã có dây được sử dụng với bất kỳ ống tiêm, dây truyền để hỗ trợ bơm thuốc, dịch truyền vào cơ thể bệnh nhân, Sử dụng để kết nối các đường truyền

### 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Hiện chưa có chống chỉ định đối với sản phẩm

### 5. TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA :

- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Sản phẩm tiệt trùng, sử dụng một lần
- Sản phẩm không độc, không có thuốc nhuộm, không chứa latex

### 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- Các bước dẫn sử dụng Sử dụng kỹ thuật vô khuẩn.
- Lau vị trí tiêm thuốc trước khi dùng theo quy trình tại cơ sở y tế.
- Sử dụng xy lanh có đầu khóa vặn xoắn không kim để kết nối. Xy lanh có đầu khóa trượt phải được gắn chặt và xoay 90o . Thông rửa theo quy trình tại cơ sở y tế. Sản phẩm thay thế theo quy trình tại cơ sở y tế và Bộ Y Tế.
- Chúng tôi khuyến cáo đuổi khí hoàn toàn bộ khóa ba ngã. Nếu không đuổi khí cẩn thận, 0.15 ml khí ở mỗi đầu khóa có thể còn lại trong hệ thống truyền dịch.
- Khử khuẩn đầu khóa bằng Softa® Cloth CHX 2% theo hướng dẫn của sản phẩm.

### 7. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

Nguy cơ/ Cảnh báo :



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Triều



- Tái sử dụng thiết bị sử dụng một lần gây nguy cơ cao cho bệnh nhân và người sử dụng. Nó có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và/ hoặc suy giảm chức năng. Nhiễm khuẩn và/ hoặc giới hạn các chức năng của thiết bị có thể dẫn đến tổn thương, bệnh hoặc chết cho bệnh nhân. Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy.
- Không tái khử trùng.

8. **BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUNG:**

- Đảm bảo điều kiện vô trùng cần thiết khi thao tác với sản phẩm
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo

9. **HỦY BỎ:**

- Sau khi sử dụng thiết bị nên xử lý theo quy định xử lý rác thải y tế theo quy định hiện hành của địa phương

10. **VẬN CHUYỂN:**

- sản phẩm được vận chuyển bằng phương thức vận chuyển tiêu chuẩn dành cho thiết bị y tế.

11. **BẢO QUẢN:**

- bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

12. **THỜI HẠN SỬ DỤNG:** 5 năm từ ngày sản xuất

